



Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ
Ορθοπεδικός σας!



Ηλεκτρικό Χειροκίνητο Αμαξίδιο με ερπύστριες για ανάβαση/κατάβαση σκάλας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πριν από τη χρήση του, διαβάστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες ορθής λειτουργίας για να κατανοήσετε σε βάθος κάθε μέρος του οδηγού. Σε καμία περίπτωση μην το χρησιμοποιήσετε διερευνητικά, εάν πρώτα δεν έχετε κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία του, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στο αμαξίδιο ή ακόμα και σωματικές βλάβες. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο : **2109236333**
2. Η ασφαλής χρήση του προϊόντος, εξαρτάται εξολοκλήρου από το εάν εφαρμοστούν οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις που παρέχονται στον συγκεκριμένο οδηγό ορθής λειτουργίας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή βλάβες που μπορούν να προκληθούν από τη μη συμμόρφωση στις οδηγίες ορθής λειτουργίας του προϊόντος.
3. Ακολουθούν σημαντικές συμβουλές για την ορθή χρήση του προϊόντος. Διαβάστε με μεγάλη προσοχή για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με απόλυτη ασφάλεια το ηλεκτρικό αναρριχόμενο αμαξίδιο.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

- Πρώτον, Ο σκοπός.....
- Δεύτερον, Σύνολο λίστας ρυθμίσεων προϊόντος.....
- Τρίτον, ηλεκτρική μηχανή αναρρίχησης, χαρακτηριστικά.....
- Τέταρτον, τεχνικοί παράμετροι και δείκτες απόδοσης ηλεκτρικού μηχανήματος αναρρίχησης.....
- Πέμπτο, βασικές δομές.....
- Έκτο, χρησιμοποιώντας την μέθοδο lysocare.....
- Έβδομο, ηλεκτρική μηχανή αναρρίχησης δαπέδου, οδηγίες χρήσης.....
- Οκτώ, λοιπές σημειώσεις.....
- Εννέα, διατηρώντας την κοινή λογική.....
- Δέκα, μετά την πώληση.....

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα
Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα
ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr
Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr
Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr



Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ
Ορθοπεδικός σας!



Αγαπητοί χρήστες, σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε το πολλαπλών χρήσεων ηλεκτρικό αναρριχόμενο αμαξίδιο. Ευχόμαστε ολόψυχα να σας προσφέρει άνεση και ταχύτητα στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική σας ζωή.

Για την ομαλή και ορθή λειτουργία του προϊόντος, παρακαλείσθε να το διατηρείται σε καλή κατάσταση για να παρατείνετε όσον το δυνατό περισσότερο τη διάρκεια ζωής του. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση!

Χρήση

Είναι κατάλληλο για ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ικανότητες αλλά και για άτομα που δεν μπορούν να περπατήσουν σωστά. Ειδικότερα, ενδείκνυται για ανεβοκατέβασμα σκάλας ή όταν υπάρχουν εμπόδια στον δρόμο και παρεμποδίζεται η ομαλή βάδιση.

Σύνολο λίστας ρυθμίσεων προϊόντος

Αναρριχόμενο αμαξίδιο πολλαπλών χρήσεων (1 σετ)

Φορτιστής (1)

Οδηγός λειτουργίας για τον χρήστη (1 αντίγραφο)

Εγγύηση ποιότητας προϊόντος (1 αντίγραφο)

Πιστοποιητικό καταλληλότητας (1 αντίγραφο)

Εργαλεία πολλαπλών χρήσεων (1 σετ)

Ηλεκτρικό αναρριχόμενο αμαξίδιο πολλαπλών χρήσεων, κύρια χαρακτηριστικά:

1) Ισχυρή αναρριχητική ικανότητα: Το αμαξίδιο είναι εξοπλισμένο με ισχυρή τροφοδοτική ικανότητα, 24 volts και 20 amperes, για να μπορεί να είναι ακόμα πιο ανθεκτικό για μεγάλες μεταφορές. Με μια μόνο φόρτιση, μπορεί συνεχόμενα να πραγματοποιήσει 500 βήματα (20 σκαλοπάτια για κάθε όροφο, συνολικά 25 δάπεδα).

2) Η απλή και άνετη λειτουργία του, διασφαλίζει μια άνετη και ομαλή οδήγηση. Χάρη στο ειδικό σασί και ερπυστριοφόρου που διαθέτει, καθιστά την οδήγηση του εύκολη και άνετη. Ο χειριστής μπορεί να διαθέτει τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος χάρη στην μικρή ακτίνα στροφής, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της ανάβασης που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα ηλεκτρικά τροχοφόρα αμαξίδια, (εξαιτίας της αστάθειας που δημιουργείται μεταξύ του τροχού και του σκαλοπατιού). Έτσι μειώνονται κατά μεγάλο ποσοστό οι κραδασμοί που μπορεί να βιώνει ο χειριστής κατά τη χρήση του. Ταυτόχρονα, λόγω της χρήσης μαλακών υλικών

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr

Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr



Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ
Ορθοπεδικός σας!



καθισμάτων πλάτης αλλά και των υπολοίπων αξεσουάρ υψηλής ποιότητας, δημιουργεί αίσθημα άνεσης και σταθερότητας στους χρήστες.

3) Ευρύ φάσμα εφαρμογών, υψηλή απόδοση κόστους: Σκάλες, εμπόδια, βόλτες στην πόλη στην εξοχή, μέσα σε κατοικίες, νοσοκομεία, σε πολλές και ποικίλες περιπτώσεις, το ηλεκτρικό αναρριχόμενο αμαξίδιο πολλαπλών χρήσεων, μπορεί να ανταπεξέλθει παντού, καθώς το σώμα της ηλεκτρικής ατμομηχανής υιοθετεί υψηλής ποιότητας πηκτικό υλικό χάλυβα. Καταφέρει επιφανειακή επεξεργασία της λάκας που ψήνει, και έτσι επιτυγχάνει την αντοχή ενάντια στη διάβρωση, έχοντας έτσι υψηλή απόδοση κόστους.

Τεχνικοί παράμετροι και δείκτες απόδοσης

Δείκτες Απόδοσης	Παράμετροι	Σημειώσεις
Συνολικές διαστάσεις (μονάδα μέτρησης μμ)	L (1100) W (710) H (1400)	Πριν από το δίπλωμα
	L (950) W (710) H (1200)	Μετά από το δίπλωμα
Μέγιστο βάρος που μπορεί να ασκηθεί	~130 κιλά	Το βάρος του οχήματος
Μέγιστο φέρον βάρος	150 κιλά	
Ταχύτητα αναρρίχησης (βήμα)	M.O 15/λεπτό	Δεν προσαρμόζετε
Ρυθμός καθόδου (βήμα)	M.O 15/λεπτό	Δεν προσαρμόζετε
Ωρα φόρτισης	6-10 ώρες	Συνεχόμενη φόρτιση
Αναρριχτική ικανότητα (βήμα)	500 σκαλιά	
Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα	Δεν προσαρμόζετε	
Η μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 24 v	20 ampere/ώρα

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr

Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr

Βασική δομή



Χρήση

1) Φόρτιση. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε για αρκετή ώρα.

Η είσοδος του φορτιστή είναι 220V AC, η τάση εξόδου είναι 24V DC. Πρώτα, εισάγετε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης στην πλευρά της μπαταρίας.

Στη συνέχεια, βάλτε τον φορτιστή. Σε τροφοδοτικό 220 v, σε αυτό το σημείο,

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr

Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr



Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ
Ορθοπεδικός σας!



Η ενδεικτική λυχνία δείχνει κόκκινο (δηλώνει η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση), όταν η ενδεικτική λυχνία γίνει πράσινη, σημαίνει ότι έχει αρκετή μπαταρία στη συνέχεια ο φορτιστής απενεργοποιείται και πρέπει να τραβήξετε έξω το βύσμα του φορτιστή και την πρίζα της μπαταρίας.

Σημαντικές συμβουλές

1. Φόρτιση

Η μπαταρία απαιτεί συνεχόμενη φόρτιση, 6 έως 10 ώρες. Όταν η ένδειξη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, ο χρόνος φόρτισης μπορεί να παραταθεί και μπορεί να φτάσει έως και 8 ώρες για να φορτίσει πλήρως. Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη, μπορείτε να συνεχίσετε να φορτίζετε μέχρι και 2 ώρες επιπλέον. Εάν ο χρόνος φόρτισης διαρκέσει περισσότερη ώρα, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στα κύτταρα που διαθέτει το αμαξίδιο.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ο φορτιστής ενδέχεται να υπερθερμανθεί. Θα πρέπει να φορτίζετε σε καλά αεριζόμενο χώρο και πάντοτε μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα. Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό 220V AC, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιούν άτομα που δεν γνωρίζουν τη χρήση του προϊόντος και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον.

Επίσης, καλό θα ήταν να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα φώτα τις ημέρες που ο καιρός είναι βροχερός.

- Ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας και ο διακόπτης αναρρίχησης μπορούν να φορτιστούν όταν είναι στην επιλογή "on" ή στην επιλογή "off". Σε περίπτωση αδράνειας για μεγάλο χρονικό διάστημα καλό θα είναι να φορτίζετε μια φορά τον μήνα.

2. Βάδισμα

Το προϊόν αυτό διαθέτει λειτουργία ηλεκτρικής οδήγησης σε επίπεδο έδαφος.

Χειροκίνητοι και ηλεκτρικοί διακόπτες κατά τη διάρκεια βάδισης (EIKONA 2). Όταν επιλέγετε την ηλεκτρική πλοήγηση, ανοίξτε τον διακόπτη του ελεγκτή (EIKONA 3), χειριστείτε την λαβή ελέγχου και αμέσως μπορείτε να ελέγχετε την κατεύθυνση και την ταχύτητα, η οποία προσαρμόζεται (EIKONA 3).

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr


Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr



电动转换把手

Ηλεκτρικός διακόπτης
μεταφοράς

(图二) EIKONA 2

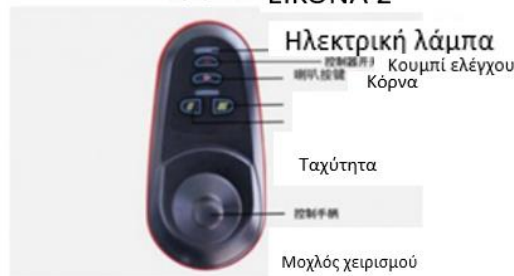

Ηλεκτρική λάμπα
控制按钮 Κουμπι έλεγχου
Κόρνα

Ταχύτητα

控制手柄
Μοχλός χειρισμού

(图三)

EIKONA 3

Σημαντικό: Δεν πρέπει να το οδηγείτε στο δρόμο. Η λειτουργία επίπεδης οδήγησης επιτρέπεται μόνο για να στρίψει το αμαξίδιο σε γωνία όπου υπάρχουν σκαλιά.

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr

Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr

3. Ανάβαση



ΕΙΚΟΝΑ 4



ΕΙΚΟΝΑ 5

Δέστε τη ζώνη σας και τοποθετήστε το αμαξίδιο με την μπροστινή του ρόδα να ακουμπάει στο πρώτο σκαλοπάτι (ΕΙΚΟΝΑ 4).

Ενεργοποιήστε το διακόπτη "lie down", ώστε το αμαξίδιο να λάβει την απαραίτητη κλίση (προς τα πίσω), αφού όμως πρώτα νιώσετε άνετα σε αυτή τη θέση (ΕΙΚΟΝΑ 5)
Ενεργοποιήστε το διακόπτη "go upstairs" (ΕΙΚΟΝΑ 5), πιέστε το διακόπτη και ξεκινήστε την ανάβαση.

Σημαντικό: Εάν ο διακόπτης αναρρίχησης ή κατάβασης δεν χρησιμοποιείται, φροντίστε να έχετε τον διακόπτη ελέγχου στη μέση, στη θέση που αναγράφει "STOP". Σε κάθε περίπτωση, πατήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης για να απενεργοποιήσετε το αμαξίδιο.

Κατάλληλη κλίση, θεωρείται η κλίση όπου το αμαξίδιο θα είναι οριζόντιο με το έδαφος, δηλαδή σε γωνία 50°-60°. Προσπαθήστε όσον το δυνατόν να διατηρείτε αυτή την κλίση.

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα
Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα
ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr
Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr
Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr

Όταν το σασί του αμαξιδίου ακουμπήσει στα τελευταία σκαλοπάτια, απασφαλίστε τον διακόπτη inching μετά απ' ασφαλίστε τον διακόπτη "down", μετά τον διακόπτη/ ιμάντα "return". Επίσης υπάρχει οθόνη όπου γίνεται καταγραφή δεδομένων κάθε στιγμή. Όταν ο διακόπτης/ιμάντας "return" έρθει σε επαφή με το έδαφος, θα νιώθετε ότι είστε ελαφρώς γεμμένοι προς τα εμπρός, τότε πατήστε τον διακόπτη "stairs backwards", για να απελευθερωθεί ο ιμάντας "return" αμέσως μετά την πρόσκρουση σε επίπεδο έδαφος.

Απ' ασφαλίστε τον διακόπτη inching και επαναλάβετε έως ότου ανεβείτε όλα τα σκαλιά. Κάντε εναλλαγή σε "sit" μόλις επιστρέψει ο μοχλός "return" σε "on" θέση. Επιλέξτε τον ιμάντα/μοχλό "return" να ανυψωθεί όταν δεν θα χρησιμοποιήσετε άλλο τις σκάλες. Η θέση του διακόπτη εναλλαγής, κάνει τους χρήστες να οδηγούν με άνεση. Επιλέξτε την ηλεκτρική ρύθμιση, για την επόμενη ανάβασή σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ολοκληρώσετε την ανάβασή σας.

Το αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση αρκετά εύκαμπτο και μπορεί να ωθηθεί αρκετές φορές όταν βρίσκετε σε σκάλες, μέχρι να επιστρέψει ομαλά και να συνεχίσει την ανάβαση ή κατάβαση



ΕΙΚΟΝΑ 6

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα
Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα
ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr
Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr
Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr



Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ
Ορθοπεδικός σας!



4. Κατάβαση

Γυρίστε τον υποστηρικτικό τροχό στη θέση “down” και γυρίστε το διακόπτη “sit and lie” στη “lie” θέση. Μόλις ο υποστηρικτικός τροχός και το σασί εμφανιστούν, το αμαξιδίδιο λαμβάνει κλίση προς τα πίσω, εναλλάζετε τον διακόπτη δαπέδου στη ρύθμιση “go downstairs” πατήστε επόμενο για ξεκινήσει η κίνηση (αφού ληφθεί η κλίση “sit and lie” ο υποστηρικτικός τροχός μπορεί να προσαρμοσθεί ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Μην κρατάτε τον μοχλό όλη την ώρα). Πρέπει το σασί να ακουμπάει πάντοτε στο δεύτερο σκαλοπάτι. Επιστρέψτε το διακόπτη τροχού στο “on” και έπειτα πατήστε το μοχλό για να κινηθεί προς τα κάτω. Όταν ο μίαντας/διακόπτης επιστροφής έχει ανυψωθεί, το σασί του αμαξιδιού πρέπει να είναι παράλληλο με τις σκάλες. Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε την καταγραφή των δεδομένων σας στην οθόνη που διαθέτει.

Όταν η πίσω γραμμή του σασί φτάσει στο προ τελευταίο βήμα, επιλέξτε το διακόπτη “sit and lie” για να φτάσετε σε καθιστή θέση και επιλέξτε το διακόπτη “down”. Μην βιάζεστε πάρτε όσο χρόνο χρειαστεί για να αποφευχθούν τυχόν υλικές φθορές.

Εφόσον βρίσκεστε σε καθιστή θέση, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάβασης και κατάβασης.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από κάθε χρήση, είναι υποχρεωτικό να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως, καθώς και να δείτε το σχετικό βίντεο.

Όταν άτομα αναλαμβάνουν να μεταφέρουν ανθρώπους πάνω ή κάτω για πρώτη φορά, καλό θα ήταν να έχουν επιπρόσθετη βοήθεια από κάποιον για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια. Σε περίπτωση κινδύνου πατήστε το κουμπί εκτάκτου ανάγκης.

Οδηγίες λειτουργίας σε επίπεδο έδαφος

Ο συμπλέκτης του κινητήρα του τροχού, περιστρέφεται 90 μοίρες (ΕΙΚΟΝΑ 3). Επιλέξτε τον διακόπτη λειτουργίας και προσαρμόστε την ταχύτητα του αμαξιδιού, γυρίζοντας την λαβή ελέγχου κατεύθυνσης (ΕΙΚΟΝΑ 4).

Η τεχνολογία USB Interface που διαθέτει επιτρέπει να φορτίσετε κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Άλλα ζητήματα που απαιτούν προσοχή

Πριν από οποιαδήποτε χρήση, θα πρέπει να έχετε διαβάσει τις οδηγίες, στη συνέχεια να εξασκηθείτε στην κίνηση του αμαξιδιού χωρίς φορτίο επάνω για να καταλάβετε και να αντιληφθείτε πλήρως τις λειτουργίες του και στη συνέχεια να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε ο ίδιος ανάβαση ή κατάβαση. Καλό θα ήταν, εάν είναι η πρώτη σας χρήση να υπάρχει κάποιος

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr

Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr



Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ
Ορθοπεδικός σας!



στο χώρο που θα μπορούσε να βοηθήσει. Σε περίπτωση κινδύνου πατήστε το κουμπί εκτάκτου ανάγκης.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι σε χαμηλά επίπεδα, φορτίστε την εγκαίρως. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες φόρτισης που προαναφέρθηκαν σε αυτό τον οδηγό.

Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα του προϊόντος κατά βούληση, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή υλικές φθορές. Δεν διατίθεται υπηρεσία after-sales. Δεν είναι κατάλληλο για τη διάσωση επικίνδυνων ασθενών.

Συντήρηση

Αντικαταστήστε το caterpillar

Το προϊόν διαθέτει παρόμοια ελαστικά με αυτά ενός αυτοκινήτου και διαφορετικά όταν επιλέγετε να το χρησιμοποιήσετε για ανάβαση ή κατάβαση σε σκάλες.

Η οδήγηση στις σκάλες ή στα οδοφράγματα έχουν διαφορετικό βαθμό φθοράς στα ελαστικά. Ανάλογα με τη χρήση του επηρεάζεται άμεσα και η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Όταν αλλάζετε το ερπυστριοφόρο, το σασί και το πλαίσιο του άξονα σύνδεσης, χρειάζονται υδραυλική ράβδο ηλεκτρικό μοτέρ και σταθερό μπουλόνι που πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθούν τα συγκεκριμένα κομμάτια για να διατηρηθεί το προϊόν σε καλή κατάσταση.

Αντικαταστήστε την μπαταρία

Η μπαταρία που χρησιμοποιείται είναι λιθίου. Οφείλετε απλώς να γυρίσετε το κλειδί της μπαταρίας. Η μπαταρία αφαιρείται και αντικαθιστάτε ως σύνολο.

Σημαντικό: Η καλωδίωση της μπαταρίας είναι θετική και αρνητική. Μην συνδέετε λανθασμένα, διαφορετικά η μπαταρία θα καεί και μπορεί να κάψει και άλλα εξαρτήματα.

After-sales

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, δώστε προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία πριν προβείτε στην αγορά του προϊόντος.

Εγγύηση επισκευής, παρέχεται στον πρώτο χρόνο χρήσης. Το προϊόν αυτό αντιμετωπίζει ποιοτικά προβλήματα που επηρεάζουν τη χρήση του. Μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν συντήρηση στο προϊόν.

Μην επισκευάζετε/συντηρείτε από μόνοι σας το προϊόν, διότι η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Διαφορετικά, εάν χρειαστεί οποιαδήποτε επισκευή θα χρεωθείτε με επιπλέον κόστος.

Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr

Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr



Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ
Ορθοπε-δικός σας!



Συντήρηση δια βίου

Εφόσον το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί από τον αγοραστή και μπορεί να προκληθούν υλικές φθορές στα εξαρτήματα, το κόστος επιβαρύνει εξολοκλήρου τον αγοραστή.

Η μπαταρία και η καταγραφή δεδομένων επειδή είναι αναλώσιμα είδη, δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση και θα χρεώνονται επιπλέον σε περίπτωση βλάβης.

Τα κουπόνια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί δεν εμπίπτουν στην εγγύηση εφόσον εκείνη λήξει.

Σημείωση: Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αναβάσεις και καταβάσεις σε σκάλες και όχι στο δρόμο ως όχημα.

Σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε, το ηλεκτρικό χειροκίνητο αμαξίδιο και σας ευχόμαστε καλή χρήση!

Ορθοπε-δικός σας για πάνω από 100 χρόνια

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα
Ιατρεία - Φυσικοθεραπευτήριο - Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr

Προϊόντα φροντίδας: www.kifidis-orthopedics.gr

Νοσηλεία κατ'οίκον: www.kifidis-care.gr