

ZERO SOLE®


Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σχεδιασμένο από ποδιάτρους, το **ZeroSole** μειώνει την πίεση έως και 28% από επώδυνους κάλους και σκληρύνσεις, προσφέροντας ανακούφιση από τον πόνο και μακροχρόνια άνεση.

Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία αποφόρτισης και τον κομψό σχεδιασμό του, το **ZeroSole** προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα προσαρμογής και άμεσης αφαίρεσης της πίεσης από οποιοδήποτε σημείο του πέλματος που επηρεάζεται από κάλους, σκληρύνσεις ή άλλες επώδυνες βλάβες.


Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις / προφυλάξεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

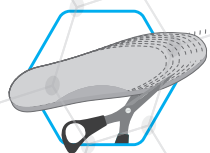

1

Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε κατά μήκος της επιλεγμένης γραμμής μεγέθους. Αν δεν είστε σίγουροι για το νούμερο, κόψτε λίγο κάθε φορά μέχρι να εφαρμόσει σωστά στο παπούτσι σας.

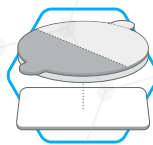

2


Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο διπλής όψης.



3

Βεβαιωθείτε ότι το πόδι είναι στεγνό και δεν έχει ενυδατωθεί πριν χρησιμοποιήσετε το αυτοκόλλητο.

Αφαιρέστε τη μισή επένδυση από το αυτοκόλλητο και τοποθετήστε τη κολλώδη πλευρά πάνω στο σημείο της βλάβης του πέλματος.

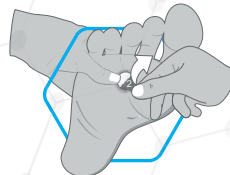

4

Πιέστε τον αντίχειρά σας πάνω στο αυτοκόλλητο και αφαιρέστε το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης.




5

Ευθυγραμμίστε, τοποθετήστε και πιέστε το πόδι πάνω στο πέλμα ZeroSole για να μεταφέρετε το αυτοκόλλητο στο πέλμα.



6

Ανασηκώστε το πέλμα και πιέστε με τους αντίχειρές σας πάνω στο αυτοκόλλητο για να εντοπίσετε ποιο εξάγωνο (-α) πρέπει να αφαιρεθεί.

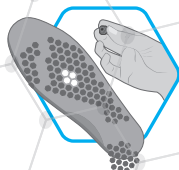

7

Πιάστε τα επιλεγμένα εξάγωνα ένα-ένα και αφαιρέστε τα αργά ώστε να δημιουργηθεί κενό. Τοποθετήστε τα πέλματα στο παπούτσι. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν αποσπώμενα πέλματα πριν τοποθετήσετε τα πέλματα ZeroSole.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Διακόψτε τη χρήση του πέλματος ZeroSole εάν:

- Νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση ή ερεθισμό όταν τον φοράτε.
- Παρατηρήσετε διαταραχή στη βάδιση σας όταν τον φοράτε.
- Τα αφαιρούμενα εξάγωνα πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα.
- Κίνδυνος πνιγμού: το προϊόν περιέχει μικρά αποσπώμενα εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε εμφανή φθορά.
- Δεν είναι κατάλληλο για άτομα με περιφερική νευροπάθεια ή ενεργά έλκη στα πόδια.