



KOD KATALOGOWY	AM-TX-10
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-TX-10
CODE	AM-TX-10
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-TX-10

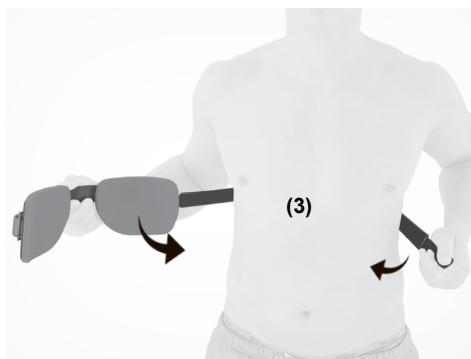

1. PL: Przyłóż ortezę do tułowia na linii żeber (1).
Jeżeli istnieje potrzeba, dopasuj rozstaw pelot do sylwetki (2).

EN: Place the brace at the bottom of your ribs (1).
If necessary, adjust the width of the front pads to your body (2).

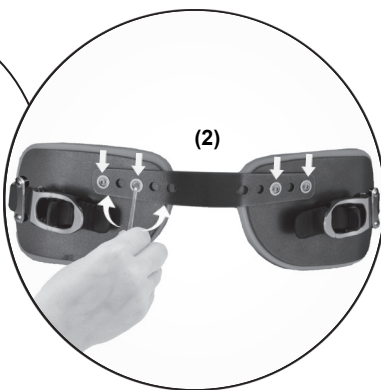

2. PL: Przyłóż tylną i przednią pelotę do ciała w odpowiednim miejscu (3).

EN: Place the back and front pads in the right place (3).

3. PL: Włóż pasek w napinacz (4)

EN: Put the belt into the tensioner (4)



4. PL: Jeżeli istnieje potrzeba, odetnij nadmiar osłony paska.

EN: If necessary, cut off the remaining part of the belt.



5. PL: Ustaw kompresję za pomocą napinaczy (4).

EN: Set the required level of compression (4).



6. PL: Jeżeli istnieje potrzeba rozpięcia ortozy, odblokuj blokady napinaczy (5).

EN: If there is a need to unfasten the brace, unlock the tensioners lock (5).



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

