



EN | Long handle (15"), light and foldable (9.5" folded), allowing you to reach inaccessible areas. Adjustable head with 1/4 turn for its various uses and with automatic inclination to adapt to the outline.

ES | Mango largo (38 cm), ligero y plegable (24 cm plegado), que permite alcanzar zonas inaccesibles. Cabezal orientable con 1/4 de vuelta para sus diversos usos y con inclinación automática para adaptarse a la silueta.




DE | Langer Griff (38 cm), leicht und faltbar (24 cm zusammengeklappt), damit Sie auch unzugängliche Stellen erreichen können. Verstellbarer Kopf mit 1/4 Drehung für die verschiedenen Anwendungen und mit automatischer Neigung zur Anpassung an der Figur an.

FR | Manche long (38 cm), léger et pliable (24 cm plié), permettant d'atteindre les zones inaccessibles. Tête réglable par 1/4 de tour pour ses différentes utilisations et avec inclinaison automatique pour s'adapter à la silhouette.



IT | Manico lungo (38 cm), leggero e pieghevole (24 cm piegato), che permette di raggiungere zone inaccessibili. Testa regolabile con 1/4 di giro per i suoi vari usi e con inclinazione automatica per adattarsi alla silhouette.

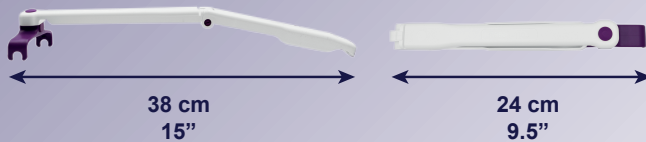

Wash with a damp cloth or under running water.
Lavar con un paño húmedo o bajo el grifo.
Mit einem feuchten Tuch oder unter fließendem Wasser waschen.
Laver avec un chiffon humide ou sous l'eau courante.
Lavare con un panno umido o sotto l'acqua corrente.



KMINA

REF: K40013

IMPROVING MOBILITY DEVELOPMENT S.L.
Avda. Mare Nostrum 1, Bloque 1, Pta 16
46120, Alboraya, Valencia, Spain
admin@kmina.com | www.kmina.com

12/01/2023 V.3.

KMINA

KMINA PRO
Foldable lotion
applicator

KMINA PRO
Aplicador crema
plegable

KMINA PRO
Faltbarer
Creme-Applikator

KMINA PRO
Applicateur de
crème pliable

KMINA PRO
Applicatore
crema pieghevole





English

Fitting accessories:
Clip the accessory onto the support.

Apply a thin layer of cream to the accessory.

Español

Colocación de los accesorios:
Coloque los accesorios en los agujeros del cabezal.

Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el accesorio.

Deutsch

Anbringen der Aufsätze:
Den Aufsatz in der Lagerung der Haltegabel einclippen.

Pflegeprodukt dünn auf das Gerät auftragen.

Français

Mise en place des accessoires:
Clipper l'accessoire dans les logements de la fourche support.

Répartir une fine couche de crème sur l'accessoire.


Italiano

Posizionamento degli accessori:
Fissare l'accessorio negli alloggiamenti della forcella supporto.

Distribuire uno strato sottile di crema sull'accessorio.



(A)

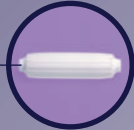

Round draining massage roller (A) to apply cosmetic, medical and suntan lotions.

Rodillo de masaje drenante bombeado (A) para la aplicación de lociones cosméticas, médicas y solares.

Gewölbte, drainierende Massagerolle (A), zum Auftragen von medizinischen-, Kosmetik-, oder Sonnenlotionen.

Rouleau de massage drainant bombé (A) pour l'application de lotions cosmétiques, médicales et solaires.

Rullo per massaggio drenante convesso (A) per applicare lozioni cosmetiche, curative e solari.



(B)



Hollow draining massage roller (B) to apply ointment, slimming creams, and refreshing gels for tired legs, on the back of the neck, arms and legs.

Rodillo de masaje drenante con cavidad (B) para la aplicación de pomadas, cremas de adelgazamiento, cremas depilatorias y gels para piernas cansadas.

Drainierende, hohle Massagerolle (B) für das Auftragen von Salben auf dem Nacken, Schlankheits- und Enthaarungscremes oder Gels für schwere Beine.

Rouleau de massage drainant creux (B) pour l'application sur la nuque, les bras et les jambes, de pommades, de crème amincissantes, épilatoires et gels jambes lourdes.

Rullo per massaggio drenante con cavidad (B) per applicare sulla nuca, sulle braccia e sulle gambe, pomate, creme snellenti e gel gambe pesanti.



(C)



Grooved disc (C) to apply exfoliating creams and very thick creams.

Disco ranurado (C) para la aplicación de cremas exfoliantes y cremas muy grasas.

Gerillte Scheibe (C) zum Auftragen von Peelincres und sehr fetten Cremes.

Disque rainuré (C) pour l'application de crèmes exfoliantes et de crèmes très grasses.

Disco scanalato (C) per applicare creme esfolianti e creme molto grasse.



(D)



Bath sponge (D) for spreading the bath gel.

España de baño (D) para esparcir el gel de baño.

Badeschwamm (D) zum Verteilen des Badegels.

Eponge de bain (D) pour étaler le gel de bain.

Spugna da bagno (D) per spalmare il gel da bagno.