




100 North Florida Ave.
Belleville, IL 62221 USA
U.S. & Canada: 800-851-3449
Outside U.S.: 618-277-9173 / Fax: 618-277-9561

Ρύθμιση ISOFLO Memory Control®


- ROHO® QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®
- ROHO® QUADTRO SELECT® MID PROFILE™
- ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®
- ROHO® CONTOUR SELECT®



Τοποθετήστε το μαξιλάρι στο κάθισμα με τον διακόπτη προς τα έξω. Γυρίστε τη βαλβίδα αριστερόστροφα για να ανοίξει.

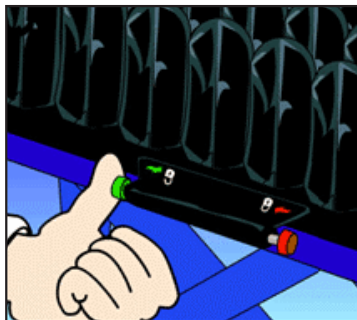

Ρυθμίστε τον διακόπτη στο πράσινο, για να ανοίξει το σύστημα ISOFLO και να κυκλοφορήσει ο αέρας σε όλο το μαξιλάρι

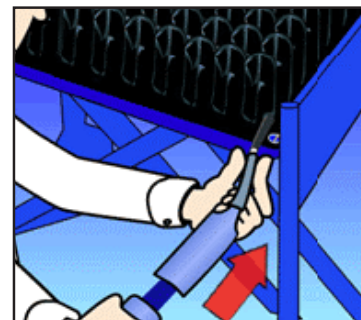


Τοποθετήστε τη τρόμππα χειρός στη βαλβίδα και φουσκώστε το μαξιλάρι, μέχρι να αρχίσει να κυρτώνει ελαφρώς προς τα πάνω.



Γυρίστε τη βαλβίδα δεξιόστροφα για να κλείσει. Απομακρύνετε τη τρόμππα



Βοηθήστε το χρήστη να καθίσει στο κέντρο του μαξιλαριού. Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί τη φυσική του στάση σώματος.

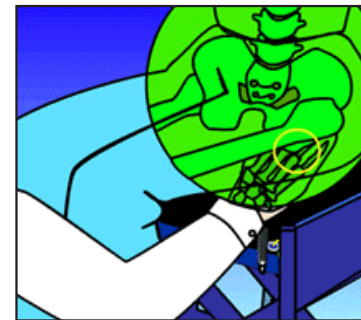

Τοποθετήστε το χέρι σας ανάμεσα στο μαξιλάρι και το σώμα του χρήστη. Ανασηκώστε ελαφρώς το πόδι του και βρείτε το σημείο με την χαμηλότερη οστική προεξοχή.



Χωρίς να μετακινήσετε το χέρι σας γυρίστε τη βαλβίδα αριστερόστροφα για να ανοίξει. Αφαιρέστε αέρα μέχρι τα δάχτυλά σας να κινούνται με δυσκολία. Κλείστε τη βαλβίδα.



Ο χρήστης πρέπει να καθίσει στην θέση που τον βολεύει, ώστε να κατανομηθεί ο αέρας ανάλογα σε όλο το μαξιλάρι. Όταν ολοκληρωθεί η κατανομή γυρίστε τον διακόπτη στο κόκκινο