



Orteza została wyposażona w szynę boczną, która posiada blokadę kąta **zgięcia i wyprost** w zakresie: 0°, 20°, 45°, 70°, 90°, 110°, 125°.

rys.1

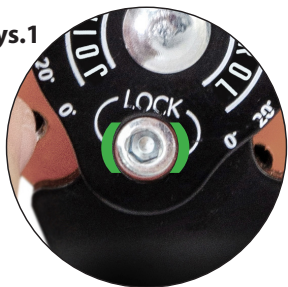

rys.2

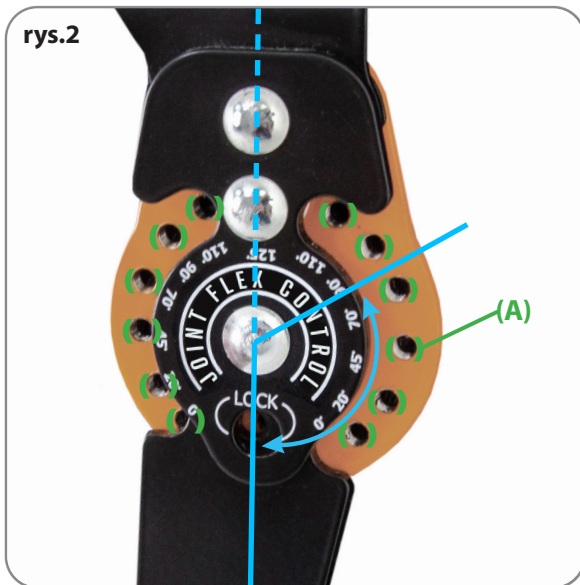

rys.3



1. Przed ustawieniem szyny, usunąć wkręt blokujący umieszczony w zegarze z opisem „**LOCK**” (rys.1)
2. Ustaw ortezę w przybliżonym położeniu, w którym chcesz ograniczyć **zgięcie/wyprost (A)** (rys.2) i zablokować zakres ruchomości stawu za pomocą wkrętów i kluczyka (rys.3)
3. Sprawdź poprawność działania i zakres ruchów zegara

ZAKRES RUCHÓW I JEGO WARTOŚCI KĄTOWE USTALA LEKARZ PROWADZĄCY!

UWAGA: Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprost. Szyny boczne nie wymagają konserwacji



REH4MAT sp. z o.o.

ul. Zenitowa 5a, 35-301 Rzeszów | Polska


tel. +48 16 621 42 20

tel. +48 16 621 41 35

e-mail: biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com

The orthosis has been equipped with a side splint which has a **flexion and extension** angle block in the range of: 0°, 20°, 45°, 70°, 90°, 110°, 125°.

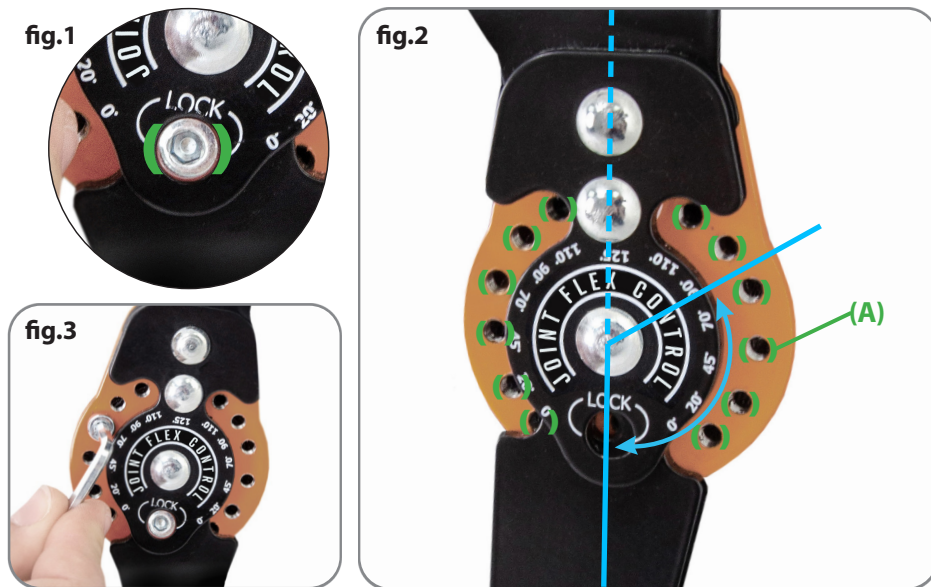

1. Before setting the splint, remove all locking screws located in the drop lock (fig.1)
2. Set the brace in the position that you want to reach and lock the **flexion/extension** (fig.2) using screws and Allen key (fig.3)
3. Check the correctness of operation and the range of clock movements

**THE ANGLE OF FLEXION AND EXTENSION IS SPECIFIED BY THE DOCTOR
OR PHYSIOTHERAPIST!**

NOTE: If the orthosis is equipped with two side splints, adjustments must be made separately on both of them, setting the same angle. The side splints are maintenance-free



REH4MAT sp. z o.o.

ul. Zenitowa 5a, 35-301 Rzeszów | Polska

tel. +48 16 621 42 20

tel. +48 16 621 41 35

e-mail: biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com