



user guide

Οδηγός χρήστη



college park

TECHNOLOGY *for the* HUMAN RACE

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ CAPITAL KNEE ΤΗΣ COLLEGE PARK!

Ο ορθοπροθετικός σας θα σας δώσει οδηγίες σχετικά με την ορθή χρήση του γόνατος. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το γόνατο ή τη χρήση του, ρωτήστε τον ορθοπροθετικό σας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ CAPITAL KNEE ΤΗΣ COLLEGE PARK

Εάν δεν εφαρμόζετε καλλυντική κάλυψη, μπορείτε να καθαρίζετε το Capital Knee της College Park σκουπίζοντάς το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρούς χημικούς παράγοντες.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το Capital Knee έχει εγκριθεί για χρήση σε γλυκό νερό.

- Το γόνατο θα πρέπει να τοποθετείται σε λειτουργία ασφάλισης όταν το χρησιμοποιείτε μέσα ή κοντά σε νερό.
- Να είστε προσεκτικοί όταν βαδίζετε σε υγρές επιφάνειες.
- Μετά την επαφή του γόνατος με υγρασία, σκουπίστε το με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι για να στεγνώσει.



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ


- Αποφεύγετε τους κινδύνους σύνθλιψης! Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας κοντά στην περιοχή κάψης του γόνατος.
- Αναφέρετε πάντα αμέσως τυχόν ανησυχίες στον ορθοπροθετικό σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: θορύβου, ξαφνικής απώλειας λειτουργίας, εμπολοκών κ.λπ.
- Μην επιχειρείτε ποτέ να προσαρμόσετε μόνοι σας το Capital Knee της College Park. Μόνο εκπαιδευμένοι επαγγελματίες θα πρέπει να κάνουν προσαρμογές στο Capital Knee της College Park.
- Μην αποσυναρμολογείτε το γόνατο. Ο ορθοπροθετικός σας μπορεί να επικοινωνήσει με τη College Park, ώστε να κανονίσει την επισκευή ή την αντικατάστασή του.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε διαβρωτικά υλικά, αλμυρό νερό ή ακραίες τιμές pH.
- Ρυπογόνα, όπως οι ακαθαρσίες, και η χρήση λιπαντικών ή κόνωσης ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του γόνατος και να οδηγήσουν σε αστοχία.
- Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε το γόνατο, καθώς ενδέχεται να ωθήσει ακαθαρσίες στο εσωτερικό του γόνατος.
- Η μη τήρηση αυτών των τεχνικών οδηγιών ή η χρήση του προϊόντος εκτός του πεδίου εφαρμογής της Περιορισμένης εγγύτητάς του ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -7°-55° C (20 - 130° F)


ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CAPITAL KNEE ΤΗΣ COLLEGE PARK

Το Capital knee της College Park διαθέτει τρεις τρόπους λειτουργίας. Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας, πιέστε προς τα κάτω την ασφάλιση του διακόπτη λειτουργίας και, στη συνέχεια, στρέψτε τον διακόπτη στην αριστερή, την κεντρική ή τη δεξιά θέση. Η ασφάλιση θα μπει στη θέση της κάνοντας κλικ όταν ευθυγραμμιστεί.

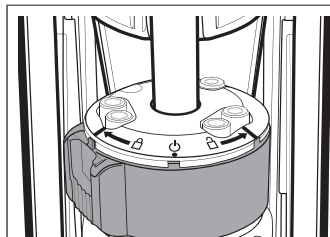


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όταν ο διακόπτης γυρίσει αριστερά, το γόνατο θα παρέχει έντονη αντίσταση στην κάμψη. Θα συνεχίσει να επεκτείνεται, έως ότου επιτευχθεί πλήρης έκταση.

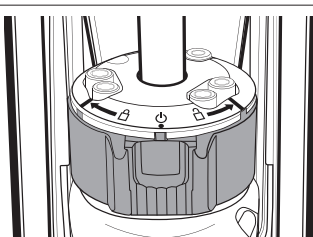

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ

Στην κεντρική θέση, το γόνατο λειτουργεί σύμφωνα με τις υδραυλικές ρυθμίσεις της αντίστασης στην ταλάντευση κάμψης, ταλάντευση έκτασης και κάμψη στάσης.

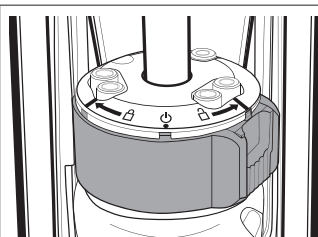

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ

Όταν ο διακόπτης γυρίσει δεξιά, η κάμψη στάσης παρακάμπτεται. Αυτό επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση κατά την κάμψη και την έκταση.



Προσοχή: Για την αποφυγή ξαφνικής κατάρρευσης, οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν εφαρμόζουν βάρος στο γόνατο καθώς βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας ελεύθερης ταλάντευσης.

EL

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Capital:

PRÓTESE EXTERNA / EXTERNAL PROSTHETIC KNEE

**CNPJ: 07.450.060/0002-36 - BLUMENTHAL
DISTRIBUIDORA - IMP, EXP, COM E DIST DE MATERIAIS
MÉDICO-HOSPITALARES E ORTOPÉDICOS LTDA**
Endereço: AVENIDA PROTÁSIO ALVES, 3540- BAIRRO
PETRÓPOLIS- PORTO ALEGRE. CEP 90410-007

FONE: 08009000518

E-MAIL: SAC-BR@OSSUR.COM

AUTORIZAÇÃO ANVISA: 8.16.900-1

NOTIFICAÇÃO ANVISA N° 81690010039

MADE IN THE USA

©2025 College Park Industries, Inc. All rights reserved.



927 INS UG CHK 250402



COLLEGE PARK INDUSTRIES, INC
27955 College Park Dr. Warren, MI 48088 USA



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street,
Sydney, NSW 2000 Australia