





Βάση ουροσυλλέκτη **Ugo Stand**

Η προσεγμένη και έξυπνα σχεδιασμένη βάση **Ugo Stand** διατίθεται με ή χωρίς κάλυμμα, το οποίο αποκρύπτει τον σάκο από την κοινή θέα.

Είναι ιδανική για ασθενείς που επιθυμούν αυξημένη διακριτικότητα κατά τη χρήση του σάκου παροχέτευσης, ενώ στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται:

- Κάλυμμα διακριτικότητας για διακριτική παροχέτευση ούρων (εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)
- Ειδικός σχεδιασμός για την πρόληψη λοιμώξεων, διασφαλίζοντας ότι η στρόφιγγα δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος

3 διαφορετικές επιλογές χρήσης για μέγιστη εργονομία



A

Βάση

Σχεδιασμένη για τη στήριξη σάκων συλλογής ούρων χωρητικότητας 2 λίτρων.



B

Κάλυμμα Διακριτικότητας

Για χρήση σε συνδυασμό με τη βάση σας, για διακριτική αποστράγγιση.

1

Στο στρώμα του κρεβατιού

Επιλογή **1**



Τοποθετείται με ασφάλεια ανάμεσα στο στρώμα και τη βάση του κρεβατιού

2

Χρήση του Γάντζου



Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο σάκος συλλογής ούρων βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης.

Επιδοπάδια Χρήση

Επιλογή **3**




5



Συναρμολογήστε το

Ugo Stand

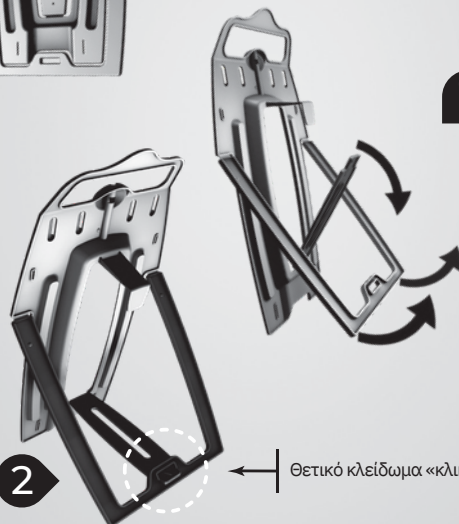

2

Θετικό κλείδωμα «κλικ».

6



Τοποθέτηση του ουροσυλλέκτη στην βάση

Σύνδεση του
ουροσυλλέκτη 2 λίτρων.

Τοποθέτηση σωλήνα στο κενό

7

Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος

1

Τοποθέτηση του καλύμματος

2

Αφαίρεση
του καλύμματος

8




Βάση ουροσυλλέκτη **Ugo Stand**

- Σχεδιασμένη για τη στήριξη του σάκου συλλογής ούρων 2 λίτρων, ως μέρος συστήματος παροχέτευσης με σύνδεση σε καθετήρα.
- Διαθέτει αφαιρούμενο κάλυμμα για τη διακριτική κάλυψη του σάκου.
- Είτε αυτοστηριζόμενη, είτε με πρακτικό άγκιστρο ή με την ειδική προεξοχή ασφάλισης στο κρεβάτι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η υποστήριξη και η κάλυψη του ουροσυλλέκτη αποσκοπεί στην παροχή άνεσης και στη μείωση του κινδύνου τραυματισμού που μπορεί να προκληθεί από το βάρος του σάκου των 2 λίτρων, το οποίο ασκεί πίεση στο σύστημα αποστράγγισης κατά τη χρήση.

Είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να μειώνει τον κίνδυνο λοίμωξης, διατηρώντας τη στρόφιγγα αποστράγγισης μακριά από το δάπεδο.

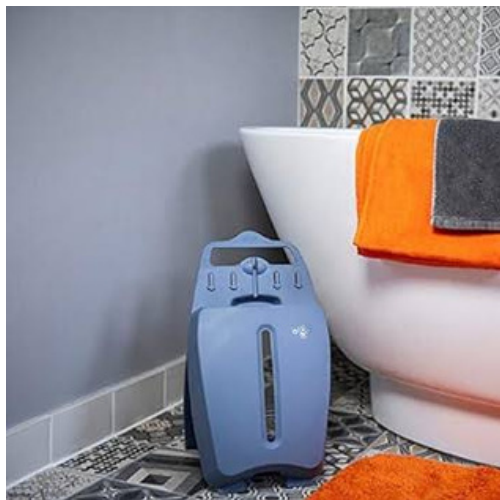

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντά

Σχολείου 6, ΤΚ 56533, Θεσσαλονίκη

+ (30) 2314 008 960 | info@urocare.gr | urocare.gr