



AGILITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




► ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε για την αγορά του AGILITY. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε με ασφάλεια την οδήγηση του ηλεκτρικού αμαξιδίου (ECV), θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο. Η ασφάλειά σας εξαρτάται τόσο από την εγρήγορσή σας όσο και από τη μηχανική κατάσταση του αμαξιδίου. Ένας έλεγχος πριν την οδήγηση και η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς άλλη ειδοποίηση.
2. Το αμαξιδιό σας μπορεί να διαφέρει ελάχιστα σε εμφάνιση από αυτό που εικονίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

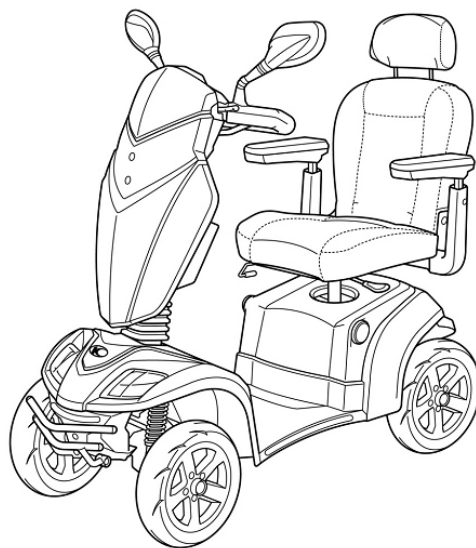

► ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3	
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	6	
3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ AGILITY.....	11	
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	14	
5. ΣΠΡΩΞΙΜΟ ΤΟΥ SCOOTER.....	15	
6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ SCOOTER.....	16	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.....	16	
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.....	16	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.....	17	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ.....	17	
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ.....	17	
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.....	18	
7.1 ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΕΣ/ΚΑΤΗΦΟΡΕΣ.....	18	
7.2 ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ.....	19	
7.3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF.....	20	
7.4 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.....	20	
7.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.....	21	
7.6 ΟΔΗΓΗΣΗ.....	23	
7.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΑΡΟ.....	24	
7.8 ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ.....	24	
7.9 ΚΟΡΝΑ.....	25	
7.10 ΦΩΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΛΑΡΜ).....	25	
		7.11 ΦΛΑΣ..... 25
		7.12 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ..... 26
		7.13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ADJ..... 26
		7.14 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MOD..... 27
		7.15 ΣΒΗΣΙΜΟ/ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ SCOOTER..... 27
		7.16 12V ΠΡΙΖΑ..... 28
	8. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.....	29
	8.1 ΕΝΔΕΙΞΗ.....	30
	8.2 ΦΟΡΤΙΣΗ.....	31

► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε με προσοχή όλο το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το scooter

Βεβαιωθείτε ότι:

1. Το εγχειρίδιο θα διαβαστεί από όλα τα άτομα που οδηγούν και συντηρούν αυτό το scooter.
2. Όλα τα άτομα που οδηγούν ή συντηρούν αυτό το scooter έχουν πρόσβαση σε αυτό το εγχειρίδιο ανά πάσα στιγμή.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

1. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό scooter εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
2. Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό scooter μόνο για τους λόγους τους οποίους προορίζεται.
3. Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό scooter μόνο εάν λειτουργεί άψογα.
4. Σε περίπτωση που σας τύχει κάποια βλάβη σταματήστε αμέσως τη χρήση του και ασφαλίστε το από τυχόν ανεπίτρεπτη χ.

5. Ρήση.
6. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να επιδιορθώνετε βλάβες άμεσα, που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία και την ασφάλεια του scooter.
7. Δώστε προσοχή στο μέγιστο φορτίο. Πιθανές βλάβες μπορούν να συμβούν σε περίπτωση που υπερβείτε το μέγιστο φορτίο (βλ. προδιαγραφές).
8. Χρησιμοποιείτε πάντα ανταλλακτικά και αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από την KYMCO.
9. Το ηλεκτρικό scooter προορίζεται για τη μεταφορά ενός μόνο ατόμου. Πιθανές βλάβες μπορούν να συμβούν σε περίπτωση που υπερβείτε το μέγιστο φορτίο.
10. Μην ρυθμίζετε το κάθισμα ενώ οδηγείτε γιατί είναι επικίνδυνο.
11. Μην βάζετε το scooter στο 'freewheel' mode (απασφάλιση του μοτέρ) όταν το μοτέρ είναι αναμμένο. Να σβήνετε πάντα το μοτέρ και να αφαιρείτε το κλειδί πριν βάλετε το 'freewheel' mode.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

1. Μην ρυθμίζετε το κάθισμα εάν το scooter βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο.
2. Μην σκύβετε έξω από τα υποβραχιόνια ή από την πλάτη του καθίσματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Κίνδυνοι ατυχήματος!

1. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των φρένων, των φώτων και των λυχνιών πριν την οδήγηση.
2. Πάντα χρησιμοποιείτε τα φώτα όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη, είτε είναι μέρα είτε νύχτα.
3. Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.
4. Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
5. Μην κλείνετε τον διακόπτη του οχήματος κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
6. Μην οδηγείτε σε κλίσεις που είναι πολύ απότομες ή πάνω από εμπόδια που βρίσκονται σε κεκλιμένο επίπεδο. Προσέξτε τη μέγιστη γωνία ανάβασης όπως υποδεικνύεται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Είναι πιθανό να δημιουργηθεί πρόβλημα στο όχημα εάν υπερβείτε την μέγιστη κλίση ανάβασης (βλ. προδιαγραφές).

7. Οδηγείτε πάντα με μειωμένη ταχύτητα όταν περνάτε από κεκλιμένα επίπεδα ή από μέρη με περιορισμένο πλάτος.
8. Οδηγείτε σε ανηφορικές ή κατηφορικές κλίσεις μόνο όταν η πλάτη του καθίσματος βρίσκεται σε όρθια θέση.
9. Μην οδηγείτε μέσα από και πολύ κοντά σε λακκούβες με νερό. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο όχημα σας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

1. Μην ρυθμίζετε το κάθισμα όταν οδηγείτε
2. Να ανεβαίνετε σε πεζοδρόμια και να διαπερνάτε εμπόδια στο χαμηλότερο σημείο και με σωστή γωνία.
3. Αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές πορείας και ταχύτητας.
4. Αποφεύγετε τις απότομες κλίσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης (χιόνι, πάγος, υγρές επιφάνειες).
5. Αποφύγετε χαλαρές επιφάνειες που δεν μπορείτε να περάσετε (δάση, παραλίες, χαλίκι).
6. Πάντα να οδηγείτε ευθεία σε κλίσεις. Μην κάνετε ζικ-ζακ.
7. Μην κάνετε αναστροφή σε κεκλιμένο οδόστρωμα.

8. Μην κατεβαίνετε σκαλιά.
9. Μην οδηγείτε με την όπισθεν σε πεζοδρόμια, κεκλιμένα επίπεδα, εμπόδια ή σκαλιά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Πάντα να σβήνετε το ηλεκτρικό scooter από τον κεντρικό διακόπτη όταν:

Θέλετε να κατέβετε ή να ανέβετε

Όταν σκοπεύετε να σταματήσετε για μεγάλο διάστημα.

Όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εάν το scooter μεταφέρεται με άλλο όχημα όταν είναι πλήρως συναρμολογημένο δεν πρέπει να βρίσκεται κανένα άτομο πάνω σε αυτό κατά τη μεταφορά ή κατά τη φόρτωσή του.

ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σπάσει το scooter λόγω αυξημένου βάρους, κατά τη μεταφορά, και κατά τις εργασίες συντήρησης.

1. Πάντα μεταφέρετε αντικείμενα με μεγάλη προσοχή.

2. Πάντα να έχετε τη βοήθεια ενός ατόμου ιδιαίτερα όταν στοιβάζετε πράγματα για μεταφορά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του οχήματος έχουν τοποθετηθεί σωστά.
2. Έπειτα από τη συναρμολόγηση ελέγξτε ότι όλα τα μέρη είναι κουμπωμένα σωστά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΛΑΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΔΩΝ

1. Εάν οι βίδες έχουν παξιμάδια ασφαλείας διασφαλίστε ότι αυτά θα αντικατασταθούν κατά την επανασυναρμολόγηση.
2. Μην αντικαθιστάτε τα παξιμάδια ασφαλείας με κανονικά παξιμάδια.
3. Εάν οι βίδες έχουν ροδέλες ασφαλείας ελέγξτε τις κατά την επανασυναρμολόγηση και αντικαταστήστε τις αν χρειάζεται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Κίνδυνος πυρκαγιάς.

1. Μην καλύπτετε το φορτιστή και τον αεραγωγό όταν φορτίζετε τις μπαταρίες.
2. Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Κίνδυνος ατυχήματος.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή μπαταριών.
2. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες σας απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο “προδιαγραφές”.
4. Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις που δίνονται από τον κατασκευαστή των μπαταριών.
5. Οι μπαταρίες είναι εξαιρετικά βαριές.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μπαταρίες που χάνουν υγρά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.

1. Μην αγγίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες με τα χέρια σας. Χρησιμοποιείτε λαστικένια γάντια.
2. Εάν έρθει το οξύ σε επαφή με το δέρμα σας ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
3. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας ξεπλύνετε με πολύ νερό και επισκεφτείτε ένα γιατρό.
4. Αμέσως αλλάξτε ρούχα που τυχόν έχουν βραχεί από οξύ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Κίνδυνος ατυχήματος λόγω βλάβης.

Το ραδιόφωνο οι τηλεοράσεις και τα κινητά τηλέφωνα δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορούν να επηρεάσουν τα ηλεκτρικά του scooter


1. Μην οδηγείτε κοντά σε κεραίες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
2. Απενεργοποιείτε το scooter όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


Το scooter παράγει ηλεκτρομαγνητικά πεδία που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία άλλων συσκευών που βρίσκονται στο γύρω περιβάλλον (κινητά τηλέφωνα, ιατρικά μηχανήματα).

► ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ AGILITY


1. Χειρολαβή
2. Ψηφιακός πινάκας
3. Φρένο
4. 12V πρίζα
5. Φώτα πορείας
6. Τροχοί
7. Κάθισμα
8. Πίσω φώτα

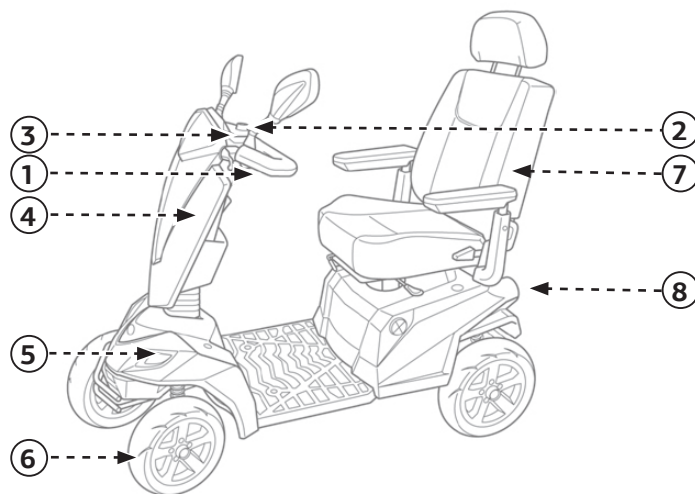

1. ADJ ρύθμιση
2. Ψηφιακή οθόνη
3. Διακόπτης θερμοκρασίας
4. Φώτα
5. Κόρνα
6. Αριστερό φλας
7. Ρύθμιση ταχύτητας
8. MOD ρύθμιση
9. Ρύθμιση ώρας
10. ALARM
11. Ρύθμιση
12. Δεξί φλας

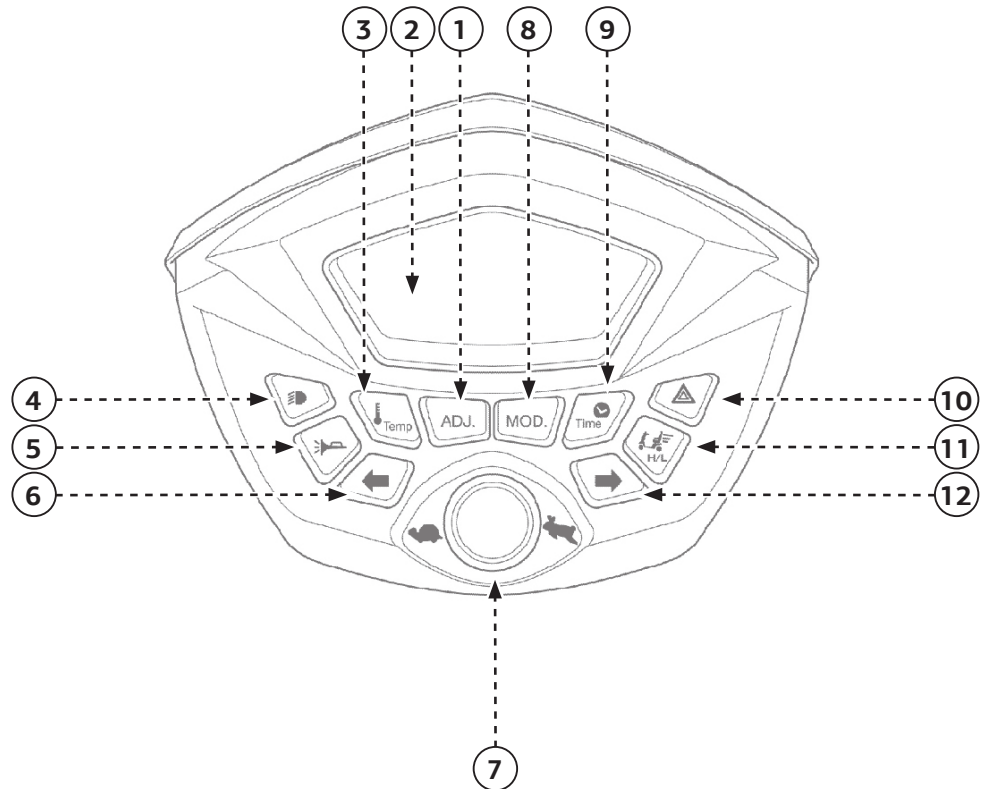

1. Ένδειξη φωτών
2. Φλας
3. Ένδειξη θερμοκρασίας
4. Μπαταρία
5. ODO/TRIP
6. Ταχύτητα
7. Ώρα
8. Ένδειξη H/L
9. SERVICE
10. Ένδειξη ταχύτητας

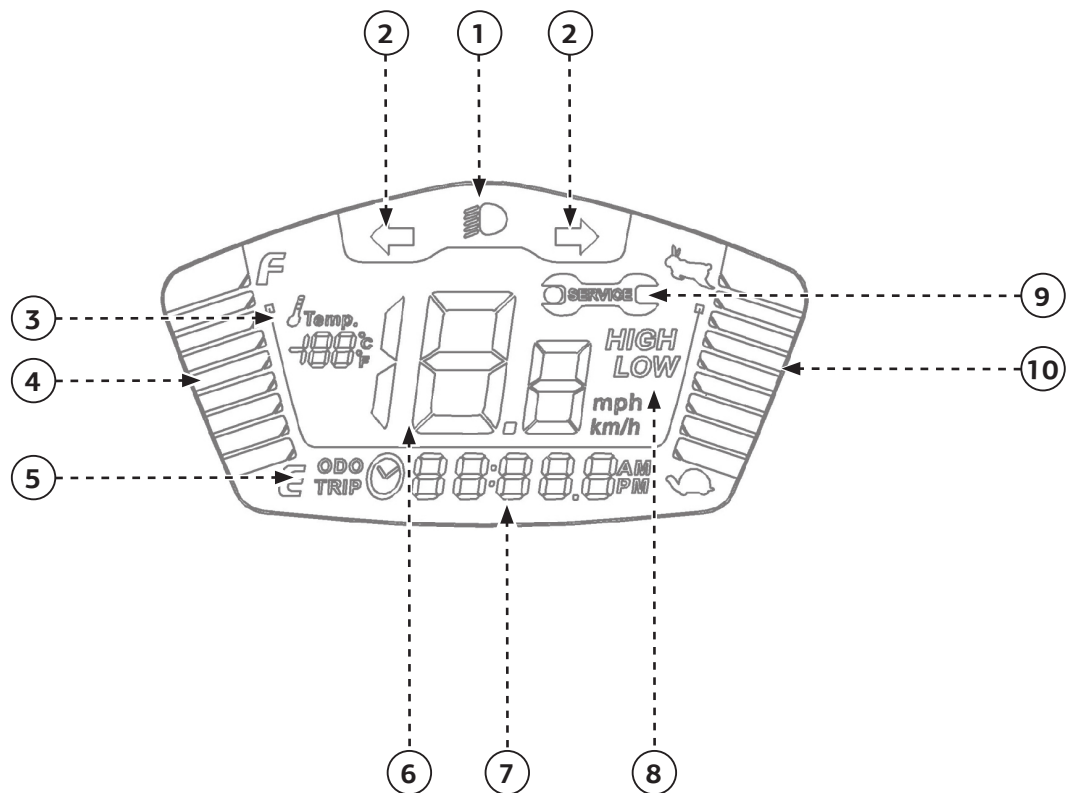

► ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	AGILITY
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ	160kg
ΥΨΟΣ	1120 mm
ΜΗΚΟΣ	1300 mm
ΠΛΑΤΟΣ	575 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ, 24-volt DC ΜΟΤΕΡ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	12 V × 50 Ah × 2 T.M.X
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	Off-board Input voltage : 200/240VAC, Output voltage : 24VDC Output current : 5A
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	12 in*2
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ	12 in*2
ΠΙΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ, ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	12 ΜΟΙΡΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	40km
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	
ΜΠΡΟΣΤΑ	12.8 kph
ΟΠΙΣΘΕΝ	4.5 kph
ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	1850 mm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	460 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	406 mm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	420 mm
ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	5 kg

► ΣΠΡΩΞΙΜΟ ΤΟΥ SCOOTER

Για να μπορέσετε να σπρώξετε το scooter πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το μοτέρ κίνησης. Για να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιήστε το μοχλό που βρίσκεται στη δεξιά μεριά του scooter.

Δεν πρέπει κανείς να κάθεται στο scooter όταν το σπρώχνετε.


Σβήστε το scooter.

Τραβήξτε το λεβιέ (1) προς τα πάνω μέχρι να σταματήσει.

Πιέστε το λεβιέ προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Πάντα να σβήνετε το scooter για να το σπρώξετε. Αν η προκαθορισμένη ταχύτητα ξεπεραστεί όσο σπρώχνετε το scooter, το φρένο του κινητήρα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα φρενάρει.

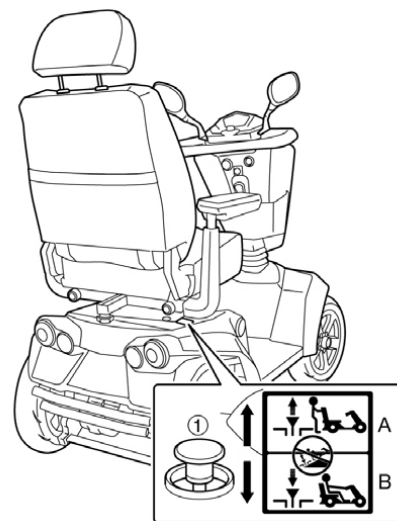


► ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ SCOOTER

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τραβήξτε προς τα επάνω τον μοχλό (1) και σείρετε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση or distance.
2. Απελευθερώστε τον μοχλό ώστε να επιτρέψετε το κάθισμα να 'κλειδώσει' στην επιθυμητή θέση.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ

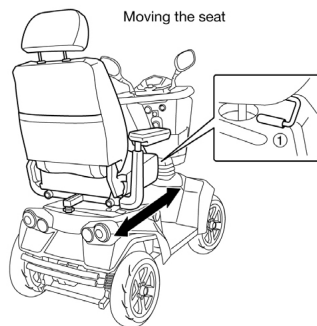

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1. Σηκώστε τον μοχλό του καθίσματος (βλ. Εικόνα) και περιστρέψτε το κάθισμα.
2. Καθήστε στο κάθισμα και γυρίστε το προς την κατεύθυνση του τιμονιού ώστε να ασφαλίσει. Ελευθερώστε τον μοχλό.

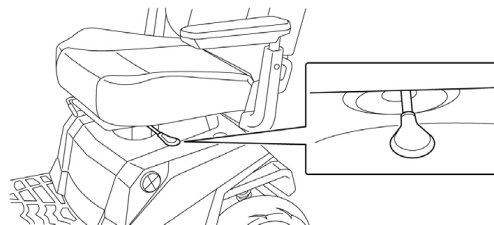

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τραβήξτε το μοχλό κλειδώματος και ρίξτε την πλάτη προς τα πίσω στην επιθυμητή θέση.
2. Αφήστε το μοχλό κλειδώματος και κλειδώστε το κάθισμα σπρώχνοντάς την πλάτη ελαφρώς μπροστά και πίσω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ

Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα πάνω μέχρι να το ακούσετε να κλειδώνει στην επιθυμητή θέση

ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ

1. Πιέστε το μοχλό κλειδώματος προς τα μέσα και σπρώξτε το προσκέφαλο προς τα κάτω.
2. Αφήστε το μοχλό και αφήστε το προσκέφαλο να κλειδώσει πιέζοντάς το προς τα κάτω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Να προσαρμόζετε πάντα την γωνία του τιμονιού ώστε να φτάνετε με άνεση τόσο το τιμόνι όσο και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων

1. Τραβήξτε τον μοχλό(1).
2. Διατηρώντας τον μοχλο κρατημένο προσαρμόστε την γωνία που σας βολεύει.(2)
3. Ελευθερώστε τον μοχλό.
4. Βεβαιωθείτε πως το τιμόνι έχει κλειδώσει στην επιθυμητή θέση.



► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πάντα να ακολουθείτε τις πληροφορίες ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Η οδήγηση του scooter είναι πολύ εύκολη και απλή και έπειτα από λίγη εξάσκηση θα τη βρείτε πολύ εύκολη. Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κινείστε με ασφάλεια στην κίνηση.

1. Πάντα να ρυθμίζετε την ταχύτητά σας ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.
2. Πάντα να ελαττώνετε την ταχύτητά σας όταν περνάτε από:
Από στενές περιοχές
Κλειστές στροφές
Κλίσεις
Ράμπες
3. Κάντε πρώτα μία δοκιμαστική βόλτα με το ηλεκτρικό scooter σε χώρο χωρίς πεζούς είτε σε κλειστό χώρο.

4. Πάντα να στρίβετε χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια.
5. Κρατάτε πάντα τα πόδια σας μέσα στο όχημα όταν οδηγείτε.

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΦΟΡΕΣ

Το scooter μπορεί να ανέβει ανηφόρες με κλίση έως και 12 μοιρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το scooter με το μέγιστο φορτίο μπορεί να ξεκινήσει να φρενάρει και να στρίψει σε αυτές τις κλίσεις. Είναι δυνατό να μπορέσει να λειτουργήσει και σε λίγο πιο απότομες κλίσεις ωστόσο δεν ενδείκνυται. Ο αισθητήρας ροπής και κλίσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να διακόψει την λειτουργία του μοτέρ για λόγους προστασίας του. Αυτό μπορεί να συμβεί από συνδυασμό παρατεταμένης οδήγησης σε ανηφόρα, από κλίση ανηφόρας παραπάνω από την επιτρεπτή, από υπερβολικό φορτίο είτε από συνδυασμό όλων των παραπάνω.

Αποφεύγετε να οδηγείτε κατά μήκος μιας ανηφόρας
Πάντα να οδηγείτε προς την κατεύθυνση της
ανηφόρας/κατηφόρας.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής ανεβαίνοντας ή
κατεβαίνοντας κεκλιμένα επίπεδα εάν:

1. Το scooter είναι φορτωμένο στο πίσω μέρος
2. Η πλάτη του καθίσματος είναι γερμένη προς τα
πίσω και το κάθισμα τραβηγμένο προς τα πίσω.

Μπορείτε να επιτύχετε περισσότερη ασφάλεια εάν:

1. Ρυθμίσετε το κάθισμα σε μία μπροστινή θέση
2. Εάν ρυθμίσετε την πλάτη σε κάθετη θέση
3. Εάν γείρετε το σώμα σας ελαφρώς μπροστά

Το scooter μπορεί να ανέβει εμπόδια όπως πεζοδρόμια
με ύψος μέχρι 10 εκ.

Ελέγξτε τέτοια εμπόδια για να βεβαιωθείτε ότι το
σκούτερ σας δε θα αναποδογυρίσει.

MHN ανεβαίνετε εμπόδια και πεζοδρόμια που είναι
πολύ ψηλά.

Πάντα να ανεβαίνετε πεζοδρόμια από χαμηλωμένες
περιοχές όπως ράμπες.

MHN ανεβαίνετε σε εμπόδια όταν βρίσκεστε σε κλίση.

Προσεγγίστε τα εμπόδια σε κάθετη γωνία για να τα
ξεπεράσετε με ευκολία.

MHN οδηγείτε πάνω από εμπόδια μόνο με τη μία ρόδα.

MHN ανεβαίνετε με την όπισθεν πάνω από εμπόδια.

MHN κατεβαίνετε με την όπισθεν από τα πεζοδρόμια.

Κίνδυνος ανατροπής!

MHN κατεβαίνετε σκαλιά.

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κίνδυνος ατυχήματος

Η ανάβαση σε πεζοδρόμια απαιτεί εξάσκηση.


Φροντίστε το ύψος να μην υπερβαίνει τα 8 εκατοστά
στην αρχή.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

1. Πλησιάστε το πεζοδρόμιο με ορθή γωνία.
2. Σταματήστε περίπου μισό μέτρο πριν το πεζοδρόμιο.
3. Ρυθμίστε το ρυθμιστή ταχύτητας στη μέγιστη ταχύτητα.
4. Πιέστε ως το τέρμα το μοχλό κίνησης.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Τοποθετήστε το κλειδί στον κεντρικό διακόπτη και γυρίστε το προς τα δεξιά.

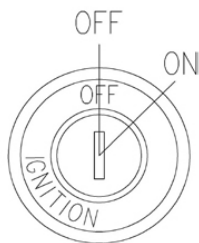


ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

LCD ΠΙΝΑΚΑΣ “On”:

Το scooter είναι έτοιμο για οδήγηση.

Εάν ο πίνακας οργάνων αναβοσβήνει πιθανόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο scooter

Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο

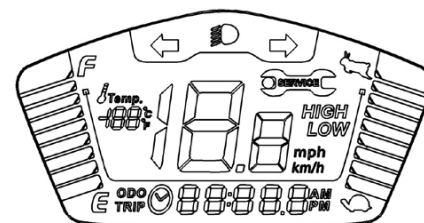

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ρυθμίζετε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις συνθήκες. Οδηγείτε με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα όταν κινείστε σε στενές περιοχές, σε κεκλιμένα επίπεδα, μέσα από πλήθος.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.


Χρησιμοποιήστε το διακόπτη γρήγορης-αργής κίνησης για να ρυθμίσετε τη μέγιστη ταχύτητα:

H (γρήγορο) = Η μέγιστη ταχύτητα θα φτάνει τα 12.8 χλμ/ώρα

L (αργό) = Η μέγιστη ταχύτητα θα φτάνει τα 4.5 χλμ/ώρα



Γυρίστε το διακόπτη στις θέσεις με την ένδειξη 'χελώνας' ή 'λαγού' για να ρυθμίσετε περαιτέρω την ταχύτητα οδήγησης.

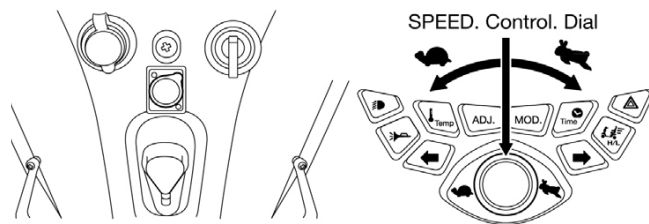




= Ελάχιστη δυνατή μέγιστη ταχύτητα με το μοχλό πλήρως πιεσμένο.



= Μέγιστη δυνατή ταχύτητα με το μοχλό πλήρως πιεσμένο.

Ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα γυρνώντας το ρυθμιστή ταχύτητας.

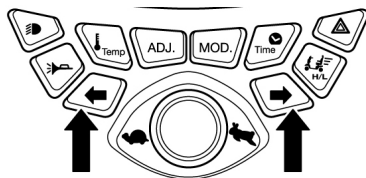


MAXER

ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ	Turtle   Rabbit
High	3.5 mph to 8 mph
Low	2.2 mph to 3.7 mph
ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΠΙΣΘΕΝ	Turtle   Rabbit
High	2.4mph to 2.78 mph
Low	2 mph to 2 mph

ΟΔΗΓΗΣΗ

Κρατήστε σταθερά το τιμόνι με τα δύο χέρια σας.
Πιέστε το μοχλό (1) προς την κατεύθυνση που θέλετε να πάτε μέχρι να φτάσετε την επιθυμητή ταχύτητα.

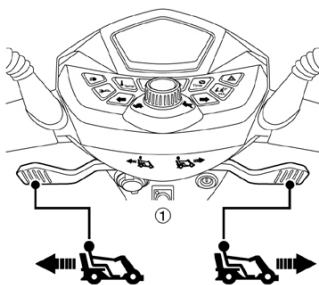

Οδήγηση προς τα μπροστά 
Πιέστε τον μοχλό μπροστά

Οδήγηση με την όπισθεν 
Τραβήξτε τον μοχλό πίσω

ΦΡΕΝΑ

1. Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρομαγνητικό φρένο του κινητήρα.

Αφήστε τον μοχλό κίνησης. Ο μοχλός σταθεροποιείται στη μεσαία θέση.


Το scooter φρενάρει με τον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Φρένο έκτακτης ανάγκης = Ελευθερώστε το μοχλό κίνησης.

Εάν τον αφήσετε ο μοχλός κίνησης επιστρέφει στην αρχική του θέση ενεργοποιώντας έτσι το φρένο του κινητήρα.

2. Χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο.
Πιέστε το μοχλό προς τη χειρολαβή.

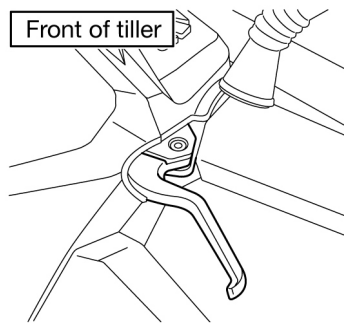

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Υπάρχει κίνδυνος ανατροπής εάν πιέσετε το μοχλό πολύ δυνατά.

Πιέστε το μοχλό σιγά για να φρενάρετε το scooter

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΑΡΟ

Σε περίπτωση που υπερβείτε το επιτρεπτό όριο βάρους του scooter (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά) ενώ παράλληλα προσπαθείτε να ανεβείτε σε κλίση θα συμβούν τα παρακάτω:

1. Το scooter θα γίνει αισθητά πιο αργό
2. Το μοτέρ θα σταματήσει.

Για να λύσετε το πρόβλημα:

- Σβήστε το scooter και περιμένετε μερικά λεπτά έως ότου κρυώσει το μοτέρ.
- Αποφύγετε το εμπόδιο.

ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ

Πιέστε το διακόπτη μία φορά για να ανάψετε τα φώτα
Πιέστε δεύτερη φορά για να σβήσετε τα φώτα.

Ο διακόπτης φωτίζεται για να δείχνει εάν τα φώτα είναι σε λειτουργία είτε όχι.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν οδηγείτε με τα φώτα πορείας ανοικτά η αυτονομία του scooter ελαττώνεται.

ΚΟΡΝΑ

Πιέστε το διακόπτη

Η κόρνα ηχεί για όσο πατάτε το διακόπτη.

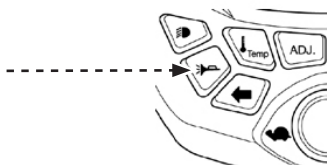

ΦΩΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΛΑΡΜ)

Ενεργοποίηση = Πιέστε το διακόπτη μία φορά για να ανάψουν.

Απενεργοποίηση = Πιέστε το διακόπτη δεύτερη φορά για να σβήσουν.

Ο διακόπτης φωτίζεται για να δείχνει εάν τα αλάρμ είναι αναμμένα ή όχι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν τα φώτα έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένα η μπαταρία αποφορτίζεται.


ΦΛΑΣ

Διακόπτης Φλας

Δεξί φλας = Πιέστε τον διακόπτη προς τα δεξιά.


Αριστερό φλας = Πιέστε το διακόπτη στα αριστερά.

Όταν πάρετε τη στροφή πιέστε το διακόπτη για να σβήσετε το φλας

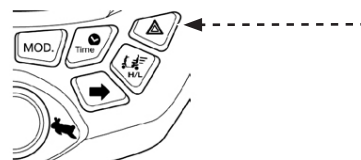

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ


Πιέστε τον διακόπτη θερμοκρασίας. Θα αλλάξει την μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

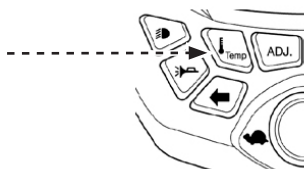

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ADJ


Πιέστε και διατηρήστε τον διακόπτη ADJ πατημένο για:

1. Να αλλάξετε αξίες.
2. Να αλλάξετε μονάδα μέτρησης (χλμ/μίλια).
3. Πιέζοντας το ADJ & MOD παράλληλα μηδενίζει ο μερικός χιλιομετρτής (TRIP).

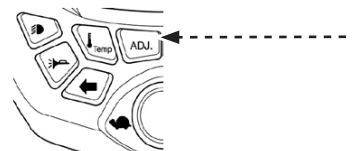

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MOD


Πιέστε το MOD διακόπτη για να δείτε ΩΡΑ-ODO (ολικό χιλιόμετρο) – TRIP (μερικό χιλιόμετρο)

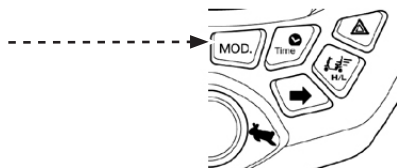

ΩΡΑ

Πιέστε τον διακόπτη TIME για:

1. Να αλλάξετε την ένδειξη (am/pm) π.μ –μ.μ.
2. Να αλλάξετε την ώρα.

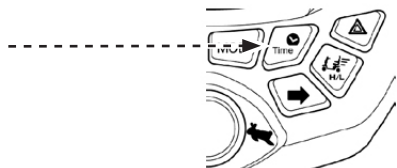


ΣΒΗΣΙΜΟ/ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ SCOOTER

Γυρίστε το κλειδί προς τα αριστερά για να σβήσετε το scooter.

Πάντα να σβήνετε το scooter από τον κεντρικό διακόπτη αν θέλετε να ανεβείτε ή να κατεβείτε. Αν σκοπεύετε να σταματήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πάντα να αφαιρείτε το κλειδί από την κλειδαριά αν θέλετε να παρκάρετε το scooter και να κατεβείτε.

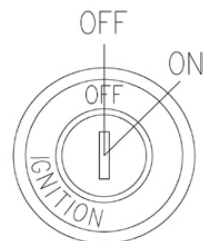

12V ΠΡΙΖΑ

Η πρίζα παρέχει 12V 2A 24W



► ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 30 βαθμών κελσίου.

Ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή μπαταριών.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Όσο διαρκεί η φόρτιση μην καλύπτετε το φορτιστή και το σύστημα εξαερισμού των μπαταριών.

Ο φορτιστής διαθέτει αυτόματο διακόπτη απενεργοποίησης που προστατεύει τις μπαταρίες από την υπερφόρτιση. Μην αφήνετε το φορτιστή συνδεδεμένο με το αμαξίδιο για περισσότερες από 24 ώρες.

Οι μπαταρίες φορτίζουν πλήρως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Απενεργοποιήστε το αμαξίδιο πριν φορτίσετε τις μπαταρίες.

ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:

Από 8 έως 9 ώρες ανάλογα με την κατάσταση των μπαταριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να φορτίζει τις άδειες μπαταρίες στο 80% της χωρητικότητας τους μέσα σε 8 ώρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.

- Εάν το scooter είναι σταματημένο, στην οθόνη η μπαταρία φαίνεται περισσότερο φορτισμένη από ότι πραγματικά είναι.
- Η ένδειξη της μπαταρίας έχει διακυμάνσεις όταν το όχημα κινείται και εξαρτάται από τον τρόπο που οδηγείτε.

- Εάν οδηγείτε σε δρόμους με μεγάλη κλίση ή με γρήγορες επιταχύνσεις ο δείκτης μπορεί να μετακινηθεί στην κόκκινη περιοχή. Αυτή δεν είναι η πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.
- Εάν ο δείκτης βρίσκεται στην πράσινη περιοχή όταν το scooter είναι ακινητοποιημένο πολύ καιρό, αυτή δεν είναι η πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.
- Εάν στο τέλος της οδήγησης ο δείκτης είναι στην κόκκινη περιοχή οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν την επόμενη διαδρομή. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν.

Καθορισμός της πραγματικής κατάστασης της μπαταρίας.

Οδηγείτε με σταθερή ταχύτητα για 200 περίπου μέτρα σε ίσιο και επίπεδο οδόστρωμα. Η ένδειξη που θα εμφανίζεται στη οθόνη είναι η πραγματική κατάσταση της μπαταρίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


1. Οι μπαταρίες από καινούργια scooter πρέπει να φορτιστούν πλήρως πριν την πρώτη οδήγηση.
2. Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μετά από κάθε λειτουργία του οχήματος.
3. Σε περίπτωση που δεν κινείται καθημερινά το scooter, πρέπει να το φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η ένδειξη μπαταρίας στον πίνακα οργάνων δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας του scooter.


F = Μέγιστη φόρτιση

E = Ελάχιστη φόρτιση. Φορτίστε άμεσα την μπαταρία

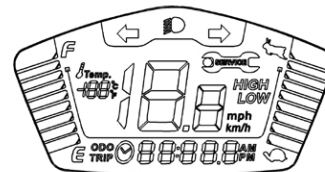


ΦΟΡΤΙΣΗ


- Τοποθετήστε το scooter δίπλα σε πρίζα.
- Σβήστε το μοτέρ και απομακρύνετε το κλειδί.
- Βεβαιωθείτε πως ο μοχλός 'freewheel' είναι στην θέση 'drive' ώστε το όχημα να μην μπορεί να μετακινηθεί.

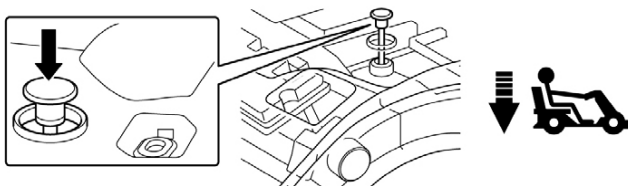


- Συνδέστε τον φορτιστή με το scooter.

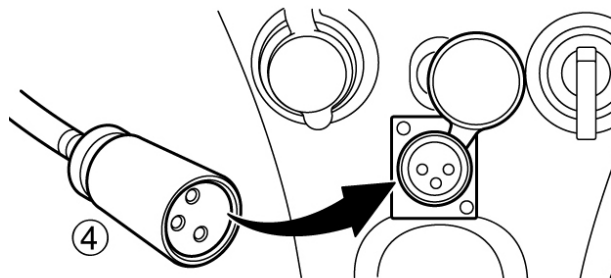

- Συνδέστε το καλώδιο με τον φορτιστή

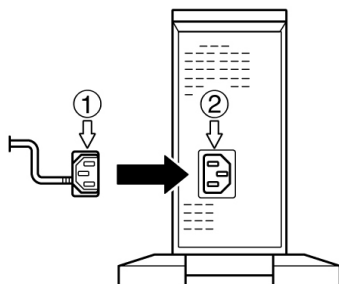

- Συνδέστε τον φορτιστή με πρίζα.

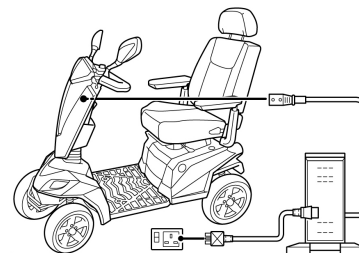


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ

LED-> ΧΡΩΜΑ-> ΕΝΝΟΙΑ

- 1 --- ΠΡΑΣΙΝΟ --- Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟΣ
- 2 --- ΚΙΤΡΙΝΟ --- ΦΟΡΤΙΖΕΙ
- 3 --- ΚΙΤΡΙΝΟ --- Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟ 90%
- 4 --- ΠΡΑΣΙΝΟ --- ΦΟΡΤΙΣΕ

4 ERROR CODE

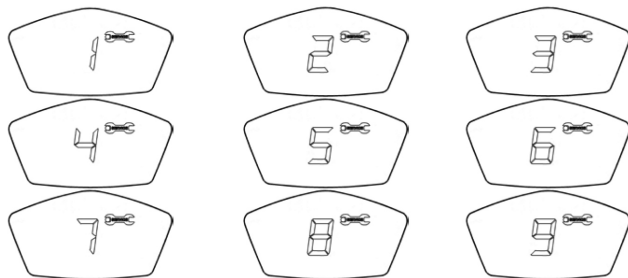

ΑΝ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΙΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ SCOOTER

► ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

► ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

► ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[illegible]

By KWANG YANG Motor Co., Ltd.

Third Edition, NOV. 2013

All rights reserved. Any reproduction or
unauthorized use without the written permission of
KWANG YANG Motor Co., Ltd.
is strictly prohibited.
T300-EQ40DA-A1



Do not remove this Owner's Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information.

Μην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν βάλετε σε λειτουργία το όχημα καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

MOTOTREND A.E.

ΑΘΗΝΑ: Βρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια 143 41, Τηλ.: (0030) 210 258 5991-2, Fax: 210 258 5993
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αχελώου 7, Τηλ.: (0030) 2310 530 728, Fax: 2310 530 738

Το δίκτυο της KYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025
web site: www.kymco.gr **e-mail:** info@kymco.gr



KWANG YANG MOTOR CO., LTD

NO. 35 Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.
Tel.: 886-7-3822526, Fax: 886-3852583
e-mail: service@mail.kymco.com