

Το Φορητό Σύστημα Ανύψωσης – Νέο μοντέλο

Το Φορητό Σύστημα Ανύψωσης μεταφέρεται εύκολα από ένα όχημα σε άλλο. Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία και έχει σχεδιαστεί για να βοηθά μηχανικά τους συνοδούς ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο να υπερβούν το εμπόδιο της ράμπας για την είσοδο σε προσαρμοσμένα οχήματα.



Καινοτομία:

- Υπάρχει διακόπτης ορίου για να σταματά η ζώνη κατά την επαναφορά. Είναι ρυθμιζόμενος ώστε το αμαξίδιο να σταματά στην ίδια θέση κάθε φορά. Αυτό το σύστημα αποτρέπει την επαναφορά της ζώνης προς λάθος κατεύθυνση.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα (γαλβανισμένα).
- Τηλεχειριστήριο με μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, πολύ εύκολο στη στερέωση και τον προγραμματισμό.
- Ομαλή εκκίνηση και στάση.
- Βελτιωμένα και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά.
- Ισχυρότερος κινητήρας.
- Ζώνες και αγκράφες υψηλής ποιότητας.
- Εύκολη εγκατάσταση 12V με την παρεχόμενη βάση στήριξης.



Βασικά Χαρακτηριστικά:

- Ισχυρός: Ικανότητα φόρτωσης 250 κιλά (σε ράμπα με 20% κλίση).
- Διαστάσεις: M25 x Π16 x Υ21 εκ.
- 2 χρόνια εγγύηση με σωστή χρήση σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Περιλαμβάνονται: δύο μπαταρίες, ένας φορτιστής, μία ζώνη 5,5 μ, μία ζώνη τύπου “Y” και δύο τηλεχειριστήρια.




Προφυλάξεις χρήσης:

- Το Φορητό Σύστημα Ανύψωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το όχημα είναι εν κινήσει.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του συστήματος συγκράτησης του αναπηρικού αμαξιδίου.
- Ελέγξτε ότι ο ιμάντας είναι καθαρός και χωρίς φθορές.
- Ο συνοδός πρέπει να καθοδηγεί και να κατευθύνει το αμαξίδιο κατά την ανάβαση και την κατάβαση.



Εγκατάσταση:

Απλή εγκατάσταση με το παρεχόμενο εξάρτημα για στερέωση στις ράγες.

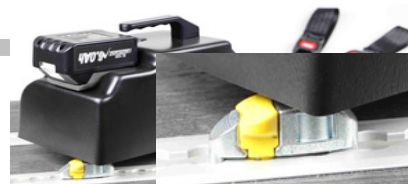

Χαρακτηριστικά λειτουργίας – Διαβάστε πριν από τη χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες και οι δεσμεύσεις είναι σωστά στερεωμένες πριν χρησιμοποιήσετε το Φορητό Σύστημα Ανύψωσης.
- Ο επιβάτης πρέπει να κάθεται σωστά, με τα πόδια και τα χέρια μέσα στο αμαξίδιο.
- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το φορητό σύστημα ανύψωσης πατώντας το κουμπί On/Off.
- Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, ελέγξτε αν ανάβει η ενδεικτική λυχνία όταν πατιέται το κουμπί – διαφορετικά, ελέγξτε τις μπαταρίες.
- Αν το φορητό σύστημα ανύψωσης δεν ανταποκρίνεται, ελέγξτε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια (φίς).
- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. Χρησιμοποιείτε μόνο τον συνιστώμενο φορτιστή.
- Συνιστάται η πλήρης φόρτιση/εκφόρτιση μία φορά τον μήνα.
- Αδειάστε την μπαταρία μέχρι το όριο του 10% και έπειτα επαναφορτίστε πλήρως χωρίς διακοπή.
- Για αποθήκευση, το επίπεδο φόρτισης πρέπει να είναι μεταξύ 55% και 75%. Η εκφόρτιση δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 10% καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Οι μπαταρίες προτιμούν το δροσερό περιβάλλον. Σε θερμοκρασία 20°C, η μπαταρία χάνει περίπου 3% της φόρτισης το μήνα.
- Αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Αποφύγετε δυνατές κρούσεις που μπορεί να προκαλέσουν διαρροή υγρών, που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην ανοίγετε τη μπαταρία – υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

Ενστικτώδης χρήση:

Δύο τηλεχειριστήρια παρέχονται με το φορητό σύστημα ανύψωσης: ένα μεγάλο για εντατική χρήση και ένα μικρό εφεδρικό.

1. Ξετυλίξτε το σχοινί πατώντας το κουμπί "OUT". Κατά την εκφόρτωση, βεβαιωθείτε ότι το αμαξίδιο είναι σταθερό όταν κινείται προς τα πίσω.
2. Επανατυλίξτε το σχοινί πατώντας το κουμπί "IN". Κατά τη φόρτωση, βεβαιωθείτε ότι το αμαξίδιο είναι σωστά τοποθετημένο στη ράμπα. Ο βιντζάς σταματά αυτόματα όταν το κουμπί απελευθερωθεί ή όταν το σχοινί φτάσει στο τελικό του σημείο.



Χρήση τηλεχειριστηρίου:

Προσθήκη τηλεχειριστηρίου:

Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα και πατήστε μία φορά το κουμπί εκμάθησης στη μονάδα ελέγχου (όπως φαίνεται στην εικόνα). Το LED θα ανάψει. Έπειτα, πατήστε ένα από τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.



Διαγραφή προγραμματισμένων τηλεχειριστηρίων:

Για διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων από τη μνήμη της μονάδας ελέγχου, κρατήστε πατημένο το κουμπί εκμάθησης μέχρι να ανάψει το LED. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, αφήστε το κουμπί – το LED θα αναβοσβήσει σύντομα για επιβεβαίωση της διαγραφής..

Αλλαγή μπαταριών τηλεχειριστηρίου:

1. Αφαιρέστε τις 2 βίδες από το πλαστικό κάλυμμα.
2. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια 2CR5 για το κύριο τηλεχειριστήριο ή δύο CR2016 για το εφεδρικό.

