



ALMOFADAS GAMA POSITPRO
ALMOFADA TIPO CALHA PARA CADEIRA POSITPRO
ALMOFADA HEMI ARM POSITPRO
ALMOFADA DE JOELHOS POSITPRO CINZA
PROTECTOR DE CALCANHAR POSITPRO CINZA
Instruções de utilização - DISPOSITIVO MÉDICO



CUSCINI GAMMA POSITPRO
CUSCINO A CANALETTA PER SEDIA POSITPRO
CUSCINO HEMI ARM POSITPRO
CUSCINO PER GINOCCHIA POSITPRO GRIGIO
SCARICO TALLONE POSITPRO GRIGIO
Istruzioni per l'uso - DISPOSITIVO MEDICO



KISSEN SERIE POSITPRO
RINNENKISSEN FÜR STUHL POSITPRO
HEMI-ARM-KISSEN POSITPRO
KNEIKISSEN POSITPRO GRAU
FERSENENTLASTUNG POSITPRO GRAU
Gebrauchsanweisung - MEDIZINPRODUKT



KUSSENS SERIE POSITPRO
GOOTKUSSEN VOOR STOEL POSITPRO
HEMI-ARM KUSSEN POSITPRO
KNEIKUSSEN POSITPRO GRIJS
HIELONTLASTER POSITPRO GRIJS
Gebruiksaanwijzing - MEDISCH HULPMIDDEL



ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΕΙΡΑΣ POSITPRO
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΥΛΑΚΩΤΟ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ POSITPRO
ΜΑΞΙΛΑΡΙ HEMI ARM POSITPRO
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΟΝΑΤΩΝ POSITPRO ΓΚΡΙ
ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΟ ΠΤΕΡΝΑΣ POSITPRO ΓΚΡΙ
Οδηγίες χρήσης - ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



PODUSZKI SERII POSITPRO
PODUSZKA RYNNOWA DO KRZESŁA POSITPRO
PODUSZKA HEMI ARM POSITPRO
PODUSZKA POD KOLANA POSITPRO SZARA
ODCIĄŻENIE PIĘTY POSITPRO SZARE
Instrukcja użytkowania - WYRÓB MEDYCZNY

REFERENCES:

829006

829033 - 829033.A - 829033.P

829074 - 829074.A - 829074.P

à/to

829082 - 829082.A - 829082.P

829084 - 829084.A - 829084.P

829086 - 829086.A - 829086.P

829098 - 829098.A - 829098.P

829099 - 829099.A - 829099.P

829118 - 829119

829130 à/to 829142

829146 à 829153







ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Χρήστης: εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε ή να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον διανομέα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, προκειμένου να αποφύγετε κινδύνους και ζημιές.

Συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε ιατροτεχνολογικό προϊόν. Θα σας συμβουλεύσει και θα σας ενημερώσει για την καταλληλότερη χρήση αυτού του προϊόντος.

Διανομέας: αυτό το φυλλάδιο πρέπει να παραδοθεί στους χρήστες αυτού του προϊόντος.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Διεύθυνση του κατασκευαστή



Πρόσκληση για αναφορά στο εγχειρίδιο χρήσης

	Ημερομηνία κατασκευής		Τήρηση των οδηγιών ασφαλείας
	Αριθμός παρτίδας		Συμμόρφωση με την οδηγία ΕΚ
	Αναφορά προϊόντος		Προστατέψτε από την υγρασία
	Ιατρική συσκευή		

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μαξιλάρια της σειράς Positpro:

Τεχνική συσκευή τοποθέτησης με μνήμη αναπνοής, προοριζόμενη για ασθενείς σε ύπτια θέση. Αυτό το προϊόν προορίζεται για ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης ελκών πίεσης. Δρα στην πρόληψη των ελκών πίεσης σε κλινήρεις και ακινητοποιημένους ασθενείς. Τα μαξιλάρια της σειράς POSITPRO επιτρέπουν τη δημιουργία συνδυασμών τοποθέτησης του ασθενούς σε ύπτια θέση για την πρόληψη των ελκών πίεσης. Δρουν μειώνοντας τα σημεία πίεσης στα σημεία στήριξης του κεφαλιού, των αγκώνων, του ιερού οστού, των πέλματος... καθώς και τα σημεία τριβής των γονάτων, των αστραγάλων, των γαστροκνημίων και άλλων περιοχών κινδύνου. Αυτό το προϊόν προορίζεται για επαγγελματίες υγείας και διατίθεται με ιατρική συνταγή. Διαβάστε τις ιδιότητες κάθε μαξιλαριού πριν από τη χρήση.

Μαξιλάρι τύπου ράγας για καρέκλα Positpro, Μαξιλάρι Hemi Arm Positpro:

Τεχνική συσκευή ΘΕΣΗΣ για ασθενείς που κάθονται σε αναπηρικό καροτσάκι. Αυτό το προϊόν προορίζεται για ασθενείς με ημιπληγία του χεριού.

Επιτρέπει τη σταθεροποίηση του χεριού και την ανακούφιση του αντιβραχίου χάρη στο καμπύλο σχήμα του.

Προσφέρει άνεση στον ασθενή κατά τη θέση του στην αναπηρική καρέκλα.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας και πρέπει να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον τύπο του διαγνωσμένου ασθενούς (ολική, μερική, αναλογική ημιπληγία). Υπόκειται στην επίβλεψη της ομάδας υγείας στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας στον ασθενή.

Γόνατο Positpro γκρι:

Τεχνική συσκευή τοποθέτησης με μνήμη αναπνοής, προοριζόμενη για ασθενείς σε ύπτια θέση. Αυτό το προϊόν προορίζεται για ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης ελκών πίεσης. Δρα στην πρόληψη των ελκών πίεσης σε κλινήρεις και ακινητοποιημένους ασθενείς. Δρα ανακουφίζοντας τα σημεία πίεσης και τριβής στα γόνατα.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για επαγγελματίες υγείας και υπόκειται σε ιατρική συνταγή. Διαβάστε τις ιδιότητες κάθε μαξιλαριού πριν από τη χρήση.

Προστατευτικό πέλματος Positpro γκρι:

Τεχνική συσκευή τοποθέτησης με εφέ μνήμης μέσω αναπνοής, προοριζόμενη για ασθενείς σε ύπτια θέση. Αυτό το προϊόν προορίζεται για ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης ελκών πίεσης. Επιτρέπει την ανακούφιση των πέλματος σε ύπτια θέση, σε πλάγια ή σε ύπτια θέση. Στερεώνεται στο στρώμα με ιμάντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ



Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται κατόπιν συμβουλής επαγγελματία υγείας και με ιατρική συνταγή. Η μη τήρηση των προφυλάξεων χρήσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμών και αλλοίωση των ιδιοτήτων του μαξιλαριού.

- Τηρείτε τις οδηγίες της ιατρικής συνταγής και το προβλεπόμενο πρωτόκολλο φροντίδας.
- Τηρείτε τις οδηγίες του γιατρού σχετικά με τον τύπο μαξιλαριού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ο οποίος θα διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.
- Μην χρησιμοποιείτε βρώμικο και μη απολυμασμένο μαξιλάρι.
- Η μη τήρηση των προφυλάξεων χρήσης μπορεί να προκαλέσει κινδύνους δυσφορίας και τραυματισμών στον ημιπληγικό ασθενή.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο — ελέγξτε τις ραφές πριν από τη χρήση.
- Εάν ο ασθενής δεν αποδέχεται το προϊόν, μην το χρησιμοποιείτε.

ΧΡΗΣΗ

Μαξιλάρια Positpro / Μαξιλάρι γονάτων Positpro γκρι / Προστατευτικό πτέρνας Positpro γκρι:



Συνιστάται να τοποθετείτε τον ασθενή κάθε 2 ώρες σε ύπτια θέση 30° (ημι-Fowler) και σε πλάγια θέση αριστερά και δεξιά 30°. Διαβάστε τα χαρακτηριστικά κάθε μαξιλαριού και τις πιθανές συνδυασμούς.

Ζητήστε συμβουλές από έναν επαγγελματία υγείας.

Η κλινική παρακολούθηση συνδυάζει την κατάλληλη ενυδάτωση και τη σωστή διατροφική παρακολούθηση του ασθενούς. Το προϊόν διατίθεται σε γκρι και μελιτζανί χρώμα (εκτός από τα 829118 και 829119).

Μαξιλάρι τύπου ράγας για καρέκλα Positpro, Μαξιλάρι Hemi Arm Positpro:

Το μαξιλάρι στήριξης βραχίονα χρησιμοποιείται για ασθενείς με ημιπληγία του βραχίονα. Πρέπει να τοποθετείται στα μπράτσα της καρέκλας, στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά. Ανακουφίζει τον βραχίονα και τον πήχη αριστερά και δεξιά. Προσφέρει άνεση στον ασθενή.

Θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας του ασθενούς και την κατάσταση των μυών (άκαμπτοι ή χαλαροί). Ζητήστε τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας.

Η αποκατάσταση είναι πρωταρχικής σημασίας στην κλινική παρακολούθηση του ημιπληγικού ασθενούς.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Πρέπει πρώτα να καθαριστεί και να απολυμανθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής. Κατά τη μεταφορά του περιπατητήρα, θυμηθείτε να παραδώσετε όλα τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα στον νέο χρήστη. Πριν από αυτό, το προϊόν πρέπει να επιθεωρηθεί από εξουσιοδοτημένο ειδικό.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Όταν το προϊόν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλον ασθενή, είναι απαραίτητο να απολυμανθεί και να χρησιμοποιηθεί υπό άψογες συνθήκες υγιεινής. Κατά την αλλαγή ασθενούς, φροντίστε να παραδώσετε αυτές τις οδηγίες στον νέο χρήστη.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Όταν το προϊόν καταστεί άχρηστο και πρέπει να καταστραφεί, επικοινωνήστε με μια τοπική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Εάν επιθυμείτε να το ανακυκλώσετε, ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μαξιλάρια της σειράς Positpro / Μαξιλάρι τύπου ράγας για καρέκλα Positpro (εκτός από μικροσφαιρίδια):

Το κάλυμμα STERITEX του μαξιλαριού POSITPRO πρέπει να απολυμαίνεται με ένα απολυμαντικό χωρίς χλώριο (σπρέι, ματηλάκι).

Το κάλυμμα πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο στους 95 °C με το φερμουάρ κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το κάλυμμα μετά το πλύσιμο.

Απολυμάνετε το μαξιλάρι μετά από κάθε χρήση. Στεγνώστε με ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, απορρυπαντικά ή χλωριωμένα προϊόντα. Σε περίπτωση φθοράς ή σχισίματος, μην επιχειρήσετε να επισκεύαστε το προϊόν. Απορρίψτε το ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας για να ελέγξετε αν καλύπτεται από την υπηρεσία μετά την πώληση (SAV).

Κάλυμμα STERITEX



Πυρήνας μαξιλαριού



Μαξιλάρι γονάτων Positpro γκρι / Προστατευτικό πτέρνας Positpro γκρι (εκτός από μικροσφαιρίδια):

Όταν το προϊόν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλο ασθενή, είναι επιτακτική ανάγκη να απολυμανθεί και να χρησιμοποιηθεί σε άριστες συνθήκες υγιεινής.

Κατά την αλλαγή ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι αυτές οι οδηγίες έχουν δοθεί στον νέο χρήστη.

Το προϊόν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο στους 40 °C.

Απολυμάνετε το μαξιλάρι μετά από κάθε χρήση. Στεγνώστε το με ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, απορρυπαντικά ή χλωριούχα προϊόντα. Σε περίπτωση φθοράς ή σχισίματος, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν. Απορρίψτε το ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας για να ελέγξετε αν καλύπτεται από την υπηρεσία μετά την πώληση (SAV).



Μαξιλάρια μικροσφαιριδίων 829130 έως 829142, 829146 έως 829153:

Όταν το προϊόν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλο ασθενή, είναι επιτακτική ανάγκη να απολυμανθεί και να χρησιμοποιηθεί σε άριστες συνθήκες υγιεινής.

Κατά την αλλαγή ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι αυτές οι οδηγίες έχουν παραδοθεί στον νέο χρήστη.

Απολυμάνετε το μαξιλάρι μετά από κάθε χρήση. Στεγνώστε το με ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, απορρυπαντικά ή χλωριούχα προϊόντα. Σε περίπτωση φθοράς ή σχισίματος, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν. Απορρίψτε το ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας για να ελέγξετε αν καλύπτεται από την υπηρεσία μετά την πώληση (SAV).

		Πλύσιμο στο πλυντήριο στους 95 °C — Συντήρηση και απολύμανση με μη χλωριωμένο βακτηριοκτόνο
		Απαγορεύεται το λεύκανση
		Πρόγραμμα μέτριας ξήρανσης
		Μην σιδερώνετε
		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Η μη τήρηση των συνθηκών αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και, κατά συνέπεια, κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών.

Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 50 °C.

Κρατήστε το μακριά από φλόγες και πηγές σπινθήρων.

Τηρείτε τις συνθήκες αποθήκευσης και φύλαξης των προϊόντων σας:

- Σε ξηρό και θερμαινόμενο χώρο
- Προστατέψτε το προϊόν από τη σκόνη με τη συσκευασία του
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο μαξιλάρι: η ίνα μπορεί να συμπιεστεί και να υποβαθμιστεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μαξιλάρια της σειράς Positpro:

Συναρμολόγηση: με ραφή από νήμα πολυεστέρα-βαμβακιού.

Γέμισμα: Ίνες TECHNI GEL άνετες στην αφή, εξαιρετικά απαλές και μαλακές. 100% πολυεστέρας με εφέ μνήμης.

Επένδυση πυρήνα: από 100% βαμβακερό ύφασμα (στημόνι και υφάδι).

Κάλυμμα σε επαφή με τον ασθενή: κατασκευασμένο από τεχνικό ύφασμα STERITEX, με επίστρωση πολυουρεθάνης, εύκαμπτο και άνετο στην αφή (190 g/m²).

Το πολυουρεθάνιο STERITEX είναι αναπνεύσιμο και αδιάβροχο χάρη στη βάση του από 100% πολυεστέρα διπλής

ελαστικότητας (190 g/m² – σύνθεση: 55% πολυεστέρας – 45% πολυουρεθάνιο).

Αυτό το προϊόν περιέχει βιοκτόνα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Προστασία από μικροβιακή αλλοίωση.

Ενεργά συστατικά: σύμπλεγμα silverglass 398477-47-9 + πυριθειόνη ψευδαργύρου.

Τα καλύμματα είναι εξοπλισμένα με φερμουάρ ZIP με πτερύγιο για καλύτερη προστασία του μαξιλαριού.

Μαξιλάρι τύπου ράγας για καρέκλα Positpro:

Συναρμολόγηση: με ραφή από νήμα πολυεστέρα-βαμβακιού.

Γέμισμα: συνδυασμός σκληρού πολυαιθερικού αφρού για στερέωση στην καρέκλα και ιξωδοελαστικού αφρού για τη θέση του βραχίονα.

Κάλυμμα σε επαφή με τον ασθενή: κατασκευασμένο από τεχνικό ύφασμα STERITEX, με επίστρωση πολυουρεθάνης, εύκαμπτο και άνετο στην αφή (190 g/m²).

Το πολυουρεθάνιο STERITEX είναι αναπνεύσιμο και αδιάβροχο χάρη στη βάση του από 100% πολυεστέρα διπλής ελαστικότητας (190 g/m² – σύνθεση: 55% πολυεστέρας – 45% πολυουρεθάνιο). Το κάλυμμα είναι εξοπλισμένο με φερμουάρ ZIP για αφαίρεση.

Αυτό το προϊόν περιέχει βιοκτόνα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Προστασία από μικροβιακή αλλοίωση.

Ενεργά συστατικά: σύμπλεγμα silverglass 398477-47-9 + πυριθειόνη ψευδαργύρου.

Γόνατο Positpro γκρι / Προστατευτικό πτέρνας Positpro γκρι:

Συναρμολόγηση: με ραφή από νήμα πολυεστέρα.

Γέμισμα: 100% πολυεστέρας με εφέ μνήμης.

Επένδυση: 54% πολυεστέρας – 46% πολυουρεθάνη.

Αυτό το προϊόν περιέχει βιοκτόνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Προστασία από μικροβιακή αλλοίωση.

Ενεργά συστατικά: σύμπλεγμα silverglass 398477-47-9 + πυριθειόνη ψευδαργύρου.

Μαξιλάρια μικροσφαιριδίων (829130 έως 829142, 829146 έως 829153):

Συναρμολόγηση: με ραφή από νήμα πολυεστέρα.

Γέμισμα: πολυστυρένιο.

Σύνθεση υφάσματος: 56% πολυεστέρας – 44% πολυουρεθάνη.

Αυτό το προϊόν περιέχει βιοκτόνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Προστασία από μικροβιακή αλλοίωση.

Ενεργά συστατικά: σύμπλεγμα silverglass 398477-47-9 + πυριθειόνη ψευδαργύρου.

Συνολικές διαστάσεις	829006 - 43 x 17 x 24 cm / 829033 829033.A 829033.P - 190 x 30 cm / 829074 829074.A 829074.P - 190 x 30 cm 829075 829075.A 829075.P - 55 x 40 cm / 829076 829076.A 829076.P - 27 x 40 cm / 829077 829077.A 829077.P - 55 x 18 cm 829078 829078.A 829078.P - 30 x 18 cm / 829079 829079.A 829079.P - 40 x 15 cm / 829080 829080.A 829080.P - 50 x 25 cm 829081 829081.A 829081.P - 78 x 35 cm / 829082 829082.A 829082.P - 30 x 15 cm / 829084 829084.A 829084.P - 50 x 17 cm 829086 829086.A 829086.P - 57 x 23 cm / 829098 829098.A 829098.P - 50 x 25 cm / 829099 829099.A 829099.P - 50 x 25 cm 829118 - 35 x 22 cm / 829119 - 90 x 20 cm / 829130 - 40 x 55 cm / 829131 - 40 x 30 cm / 829132 - 70 x 17 cm 829133 - 30 x 17 cm / 829134 - 60 x 30 cm / 829135 - 110 x 60 x 24 cm / 829136 - 130 x 18 cm / 829137 - 30 x 20 x 15 cm 829138 - 34 x 24 x 10 cm / 829139 - 200 x 35 cm / 829140 - 190 x 35 cm / 829141 - 70 x 48 cm / 829142 - 85 x 20 cm 829146 - 55 x 35 cm / 829147 - 106 x 14 cm / 829148 - 45 x 30 cm / 829149 - 140 x 35 cm / 829150 - 135 x 25 cm 829151 - 45 x 14 cm / 829152 - 45 x 23 cm / 829153 - 42 x 25 cm
Βάρος	829006 - 0,300 kg / 829033 829033.A 829033.P - 2,740 kg / 829074 829074.A 829074.P - 2,000 kg 829075 829075.A 829075.P - 0,700 kg / 829076 829076.A 829076.P - 0,720 kg / 829077 829077.A 829077.P - 0,600 kg 829078 829078.A 829078.P - 0,720 kg / 829079 829079.A 829079.P - 0,250 kg / 829080 829080.A 829080.P - 1,300 kg 829081 829081.A 829081.P - 0,450 kg / 829082 829082.A 829082.P - 0,350 kg / 829084 829084.A 829084.P - 0,500 kg 829086 829086.A 829086.P - 0,600 kg / 829098 829098.A 829098.P - 1,300 kg / 829099 829099.A 829099.P - 1,900 kg 829118 - 0,250 kg / 829119 - 0,700 kg / 829130 - 0,400 kg / 829131 - 0,400 kg / 829132 - 0,300 kg / 829133 - 0,500 kg 829134 - 0,900 kg / 829135 - 0,500 kg / 829136 - 0,400 kg / 829137 - 0,300 kg / 829138 - 0,300 kg / 829139 - 1,600 kg 829140 - 1,200 kg / 829141 - 1,200 kg / 829142 - 0,500 kg / 829146 - 1,200 kg / 829147 - 0,350 kg / 829148 - 0,300 kg 829149 - 0,950 kg / 829150 - 0,900 kg / 829151 - 0,200 kg / 829152 - 0,550 kg / 829153 - 0,650 kg

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος είναι 2 έτη υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου, εάν το προϊόν έχει χάσει τις ιδιότητες μνήμης σχήματος, εάν η επένδυση έχει υποστεί

ζημιά ή εάν τα βέλκρο έχουν φθαρεί, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο παραμένει σε καλή κατάσταση.

Η διάρκεια ζωής θα ποικίλει ανάλογα με το βάρος των ασθενών που χρησιμοποιούν το προϊόν και τον αριθμό των πλύσεων που έχουν γίνει. Η συμπίεση του προϊόντος θα αποτελεί ένδειξη φθοράς του.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον χρήστη για ελαττώματα ραφής και κατασκευής. Επικοινωνήστε με τον διανομέα από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν εάν χρειαστεί να υποβάλετε παράπονο. Οι βλάβες που προκύπτουν από τυχαία ζημιά, ακατάλληλη χρήση, ακατάλληλη αποθήκευση, λανθασμένη αποσυσκευασία, τροποποιήσεις ή φθορά δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν για την εφαρμογή της εγγύησης.