



ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ - ΟΡΘΩΤΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΕΙΔΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



AeroChamber Plus Flow-Vu

Anti-Static Valved Holding Chamber
SMALL MASK / MEDIUM MASK



Ελληνικά

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτός ο θάλαμος προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με μια δοσιμετρική συσκευή εισπνοών για τη χορήγηση φαρμάκου σε μορφή αερολύματος (aerosol) στους πνευμονές σας, όπως έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- 1. Επαιάνεστε και επιβραβεύστε τη χρήση.
- 2. Χρησιμοποιήστε "αρκούνδκια" ή κοιλίες που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν το θάλαμο για να το κάνετε να φαίνεται σαν παιχνίδι.
- 3. Εάν είναι δυνατόν, χορηγήστε τη θεραπεία όταν το παιδί είναι χαρούμενο και δεν κλαίει.

Εύκολα στη χρήση βίντεο για τους ασθενείς διατίθενται στη διεύθυνση www.aerochamber.com

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΑΛΑΜΟ

Αυτός ο θάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις οδηγίες και τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή εισπνοών.

1. Πριν τη χρήση, εξετάστε προσεκτικά τη φιάλη. Αντικαταστήστε αμέσως εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα.
2. Αφαιρέστε το πάμα από τη συσκευή εισπνοών.
3. Ανακινήστε τη συσκευή εισπνοών αμέσως πριν τη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή εισπνοών.
4. Εισαγάγετε τη συσκευή εισπνοών στο οπίσθιο τμήμα του θαλάμου.
5. Φορέστε τη μάσκα στο πρόσωπο και εξασφαλίστε αποτελεσματική σφράγιση. Ο δείκτης **Flow-Vu** κινείται μόνο εάν το παιδί έχει εξασφαλίσει καλή στεγάνωση.
6. Πιέστε τη συσκευή εισπνοών στην αρχή μιας αργής εισπνοής καθώς ο δείκτης **Flow-Vu** κινείται προς το παιδί. Χρησιμοποιήστε το δείκτη **Flow-Vu** για να μετρήσετε τις αναπνοές. Διατηρήστε τη στεγάνωση για 5-6 αναπνοές αφού πιέσετε τη συσκευή εισπνοών. Χορηγήστε έναν (1) ψεκασμό κάθε φορά.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή εισπνοών για το χρονικό διάστημα που πρέπει να περμένετε πριν επαναλάβετε τα βήματα 3-6.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αυτός ο θάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία και πρέπει να καθαρίζεται κάθε βδομάδα.

1. Αφαιρέστε το οπίσθιο εξάρτημα. Για απόσπαση του πρόσθιου εξαρτήματος, περιστρέψτε τη φιάλη όπως φαίνεται παραπάνω.
2. Εμβυθίστε και τα δύο εξαρτήματα για 15 λεπτά σε ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και χλωρού καθαρού νερού. Ανακινήστε ελαφρά. Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ασφαλώς τοποθετημένο με την πρόσοψη προς τα πάνω όπως φαίνεται στην εικόνα. Λειτουργήστε το πλυντήριο πιάτων σε κανονικό ή μικρό κύκλο και αποφύγετε το στέγνωμα με θερμότητα. Μη βράζετε ούτε να αποστειρωθείτε.
4. Ανακινήστε για να αφαιρέσετε την υπερβόλυσια ποσότητα νερού και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει σε κάθετη θέση. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν την επανααναμολόγησή τους.
5. Για επανααναμολόγηση, προσαρτήστε το πρόσθιο εξάρτημα στο άκρο της φιάλης και περιστρέψτε σταθερά έως ότου ασφαλίσει στην κλειδωμένη του θέση. Κεντράρετε το σημιάδι ευθυγράμμισης στο οπίσθιο εξάρτημα με το δείκτη του **Flow-Vu**, όπως φαίνεται στην εικόνα. Πιέστε σταθερά για να προσαρτήσετε το οπίσθιο εξάρτημα.

Σημειώσεις:

- Πρέπει να αντικαθιστάτε το προϊόν μετά από χρήση 12 μηνών.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να λατίζεται.
- Μην μοιράζεστε αυτήν την κτηριακή συσκευή με άλλους.
- Εάν παρατηρήσετε υποαίρεση φαρμάκου στο θάλαμο, ξεπλύνετε το εσωτερικό του θαλάμου οπίσθια με ένα μαλακό πανάκι.
- Δεν συνιστάται το πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων με πολύ λερωμένα πιάτα.
- Εάν χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα βοηθητικό προϊόν για το ξέπλυμα.
- **Θέματα προσοχής:**
- Μην αφήνετε το θάλαμο κοντά σε παιδιά χωρίς επίτηρηση. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Το προϊόν μπορεί να πάθει μόνιμη βλάβη αν βραστεί, αποστειρωθεί ή καθαριστεί σε πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70°C.



Διεύθ.: Λεωφ. Συγγρού 29, Τ.Κ.: 11743, Αθήνα, Τηλ: 210.92.36.333, Fax: 210.9236808
www.kifidis-orthopedics.gr - info@kifidis-orthopedics.gr