



# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΟΡΘΩΤΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ  
ΕΙΔΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## Εγχειρίδιο Χρήστη Ερεισίνωτο



Συγχαρητήρια για την αγορά σας.

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC-2007/47/EEC.

Για λόγους ασφαλείας, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σιγουρευτείτε ότι κατανοήσατε τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά.

Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε τις οδηγίες χρήσης:

- Ελέγξτε με τον προμηθευτή σας ή συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία της υγείας, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή ζημιά.
- Συμβουλευτείτε τον ιατρό ή θεραπευτή σας, για την σωστή χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο σαν βοήθημα κλίνης .

Σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι πιθανό να προκληθεί ατύχημα ή κάποια ζημιά στο προϊόν.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Το συγκεκριμένο προϊόν έχει εγγύηση για ένα (1) έτος από τη στιγμή της αγοράς. Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη ως αποδεικτικό για την αγορά.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από επισκευές που έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή ζημιές που έχουν σχέση με :
- Λανθασμένη ή κακή χρήση
- Χτυπήματα κατά την μεταφορά ή χρήση
- Ανεπαρκή συντήρηση

Κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης, το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΥΨΟΣ:54 cm

ΠΛΑΤΟΣ : 55cm

ΠΛΑΤΟΣ (ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ):11cm

ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ: 25 - 80 μοίρες

ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2.7kg

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: 110 kg

ΥΛΙΚΑ: Ατσάλι, Ύφασμα, Νάιλον, Αφρολέξ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το ερεισίνωτο που μόλις αγοράσατε είναι ιδανικό για άτομα που επιθυμούν να ανασηκώνονται στο κρεβάτι (διάβασμα, παρακολούθηση τηλεόρασης, φαγητό, κτλ.)

Χαρακτηριστικά:

- Περιλαμβάνει προσκέφαλο για πρόσθετη άνεση.
- Ύφασμα νάιλον για καλύτερο αερισμό.
- Το προσκέφαλο εφαρμόζει με velcro

Μαξιλάρι αφρολέξ



Νάιλον πλάτη

Χρήση:

- 6 διαφορετικές θέσεις ρύθμισης από 25 έως 80 μοίρες.



Θέσεις ρύθμισης

- Μπορεί να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.



## ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### Πριν τη χρήση

Ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα του προϊόντος βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από την χρήση. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

### Μέγιστο βάρος χρήστη

Δεν πρέπει να υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χρήσης του προϊόντος.(110 kg)

### Τακτικοί έλεγχοι

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που λείπουν κάποια εξαρτήματα ή είναι χαλασμένα πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθεί το προϊόν.

### Συνιστώμενη χρήση

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια. Οι χρήστες συστήνεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν το προϊόν σε υγρές ή ολισθηρές επιφάνειες.

### Τακτικό πλύσιμο

- Καθαρίζετε τακτικά με ένα υγρό σφουγγάρι, ήπιο σαπούνι ή λευκαντικό.
- Σκουπίστε με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.
- Αφήστε το προϊόν στον ήλιο να στεγνώσει μετά το πλύσιμο.
- Μην χρησιμοποιήσετε βούρτσα, λειαντικά ή σκόνη καθαρισμού.

Παρακαλώ φροντίζετε πάντα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο προϊόν και η συσκευασία του μπορούν να ανακυκλωθούν. Αφού έχετε τελειώσει με την χρήση του προϊόντος και της συσκευασίας του, παρακαλούμε να τα ανακυκλώσετε.

Για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας ακόμα περισσότερο, είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε κάθε σας σχόλιο σχετικά με την ποιότητα, την λειτουργικότητα και την χρήση των προϊόντων μας.