


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Το σύστημα ASHIPITA

Πάνω από το μεγάλο δάκτυλο

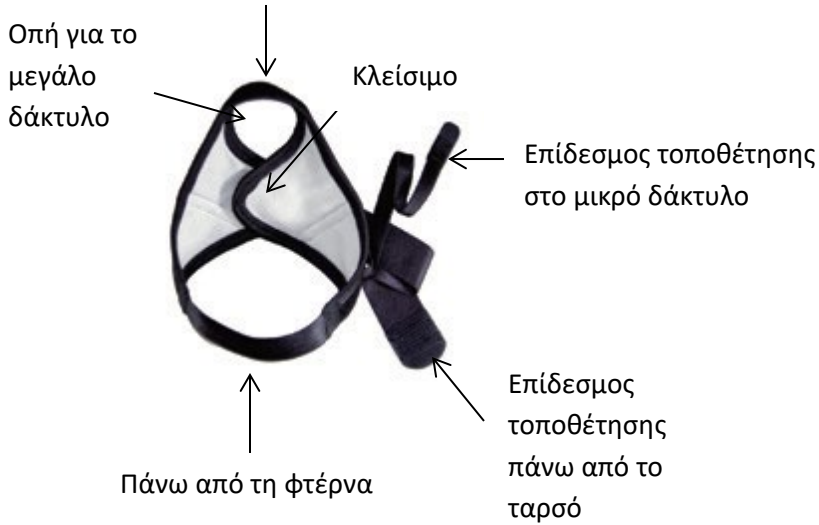

Καλτσάκι για το δεξί πόδι.

Τοποθετήστε το καλτσάκι όπως φαίνεται στην φωτογραφία ώστε να βλέπετε το άσπρο μέρος.

Το μέρος που τοποθετείται πάνω από το μεγάλο δάκτυλο βρίσκεται στο πάνω μέρος της φωτογραφίας και αυτό που βρίσκεται στην πτέρνα με τη σιλικόνη στο κάτω μέρος.

Παρακαλούμε τοποθετήστε το καλτσάκι όπως φαίνεται στη φωτογραφία και κλείστε καλά το μέρος που σημειώνεται ως 'κλείσιμο' και το οποίο τοποθετείται στην καμάρα του πέλματος.

2. Φάκελος στήριξης του μεγάλου δακτύλου (πάνω όψη)

Πάνω από το μεγάλο δάκτυλο



Το πιο σημαντικό όταν φοράτε το καλτσάκι είναι να περάσετε το μεγάλο δάκτυλο από την οπή της κάλτσας και να την σπρώξετε με τα δύο χέρια προς τα πίσω.

3. Φάκελος στήριξης του μεγάλου δακτύλου (πλάγια όψη)



Αφού έχετε περάσει το μεγάλο δάκτυλο από την οπή, περάστε υπόλοιπο καλτσάκι κατά μήκος της πατούσας σας, όπως φαίνεται στην πάνω εικόνα.

4. Τοποθέτηση στη φτέρνα



Πλάγια όψη
επίδεσμου



Πάνω όψη
επίδεσμου

Κρατήστε το μέρος που εφαρμόζει στη φτέρνα με το χέρι σας και σπρώξτε το πίσω ώστε να εφαρμόσει πίσω από τη φτέρνα σας.

5. Δέσιμο του επίδεσμου γύρω από το μικρό δάκτυλο



Επικολλήστε το
Velcro χαλαρά

Πάνω όψη του
επίδεσμου για το
μικρό δάκτυλο

Κρατήστε την άκρη του επίδεσμου τοποθέτησης γύρω από το μικρό δάκτυλο:

- I) Τοποθετήστε το κυκλικά στο διάστημα μεταξύ του μικρού δακτύλου και του 4^{ου} δακτύλου
- II) Κολλήστε το Velcro στην επιφάνεια του επίδεσμου που εφάπτεται της πατούσας σας.

6. Δέσιμο στο ταρσό



Τυλίξτε τον επίδεσμο γύρω από το ταρσό και επικολλήστε το Velcro στο κομμάτι που εφάπτεται στην πατούσα

Κρατήστε το άκρο του επίδεσμου για το ταρσό, τυλίξτε το γύρω από το ταρσό και επικολλήστε το Velcro, ασκώντας ελαφρά επιμήκυνση, στο κάτω μέρος της καμάρας του ποδιού.

Μην κολλάτε το Velcro σημείο όπου φέρει το βάρος του σώματος σας

Προσοχή! Για να αποφύγετε τη φθορά του προϊόντος, να κολλάτε το αρσενικό μέρος του Velcro με το θυληκό και όχι σε σημεία που δεν υπάρχει Velcro.

7. Όψη του ASHIPITA όταν έχει επιδεθεί σωστά



Αυτή είναι η όψη του ορθά φορεμένου ASHIPITA. Παρακαλούμε ελέγξτε ότι το καλτσάκι που έχετε προμηθευτεί είναι όπως στην πάνω εικόνα

Πλάγια όψη του ASHIPITA όταν έχει επιδεθεί σωστά



Παρακαλούμε ελέγξτε ότι το καλτσάκι είναι όπως στην πάνω εικόνα.

Σημείωση: Για να είναι πιο άνετο το καλτσάκι θα πρέπει το σημείο με το μαξιλαράκι να βρίσκεται στην ευθεία μεταξύ του μικρού δακτύλου και της φτέρνας

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι το ύφασμα στο μέρος της φτέρνας δεν διπλώνει.



Παρακαλούμε τοποθετήστε το αρσενικό και θηλυκό Velcro ακριβώς το ένα πάνω από το άλλο και κλείστε το χωρίς το ύφασμα να διπλώνει ή να στρέφεται

Σημαντικές Πληροφορίες

- Παρακαλούμε να ελέγχετε ότι το ύφασμα στην πατούσα δεν διπλώνει ή στρέφεται. Εάν συμβαίνει αυτό, ισιώστε το ύφασμα και κλείστε το Velcro ξανά.
- Από τη 2^η φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Velcro μπορεί να φορεθεί εύκολα με κλειστό το Velcro.
- Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε το Ashipita όταν πάσχετε από αγγειακές παθήσεις. Σε τέτοια περίπτωση συμβουλευτείτε το θεράπων ιατρό σας.
- Υπάρχει περίπτωση με τη χρήση του Ashipita να αισθάνεστε πόνο στο κενό μεταξύ του 4^{ου} και του μικρού δακτύλου. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε το Ashipita για μικρά διαστήματα και ελέξτε εάν περνάει ο πόνος
- Εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα ή αλλεργίες, χρησιμοποιήστε το Ashipita για μικρά χρονικά διαστήματα και παρατηρήστε εάν εμφανίζεται κάποια ανεπιθύμητη παρενέργεια.
- Μην χρησιμοποιείτε το Ashipita εάν αυτό υπερκαλύπτει πληγές, εκζέματα ή έλκη.
- Εάν παρατηρήσετε ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως κυκλοφορικά προβλήματα, οίδημα, εξανθήματα, κ.λπ. σταματήστε τη χρήση του Ashipita αμέσως.
- Εάν συμπτώματα οποιασδήποτε φύσης εμφανίζονται μετά τη χρήση του Ashipita, σταματήστε και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Παρακαλούμε να πλένετε τακτικά το Ashipita ώστε να διατηρείται ή υγιεινή των ποδιών σας.