



# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΟΡΘΩΤΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ  
ΕΙΔΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: **403.100**

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

##### Αντλία

Οι λειτουργίες της αντλίας περιγράφονται παρακάτω.


##### ✚ Διακόπτης Ενεργοποίησης (1)

Ο διακόπτης βρίσκεται στο δεξιό μέρος της αντλίας.

Η Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντλίας πραγματοποιείται πιέζοντας τον διακόπτη στην θέση ON/OFF αντίστοιχα.

##### ✚ Ρυθμιστής Πίεσης (2)

Γυρίστε τον ρυθμιστή πίεσης για να καθορίσετε το επιθυμητό επίπεδο πίεσης.

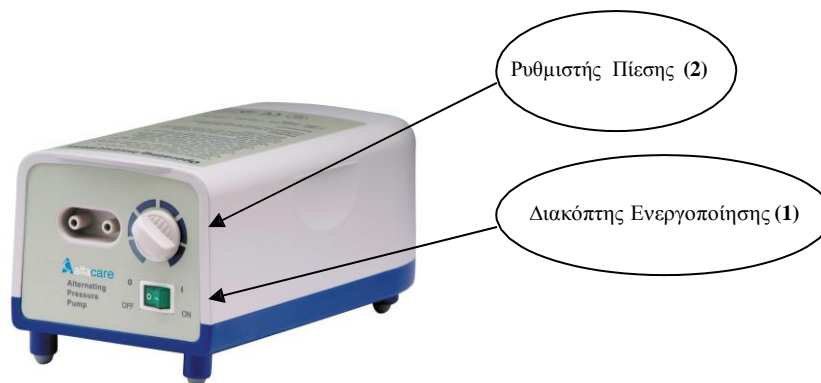

##### Στρώμα

Το σετ περιέχει στρώμα κυψελών από PVC – EN71

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ✚ Τοποθετείστε την αντλία σε οριζόντια θέση ή κρεμάστε την στο κρεβάτι από τους γάντζους που βρίσκονται στην αντλία.
- ✚ Ελέγξτε για τυχόν αιχμηρά αντικείμενα ή προεξοχές πριν από την τοποθέτηση του αεροστρώματος στο κρεβάτι.
- ✚ Τοποθετείστε το στρώμα στο κρεβάτι και ασφαλίστε το διπλώνοντας τα άνω και κάτω προεξέχοντα πτερύγια κάτω από το στρώμα του κρεβατιού.
- ✚ Συνδέστε τους σωλήνες τροφοδοσίας αέρος με τις εξόδους αέρα της αντλίας. Σιγουρευτείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν διπλωθεί ή παραμορφωθεί.
- ✚ Τοποθετείστε την ηλεκτρική αντλία σε κατάλληλη παροχή ρεύματος και ενεργοποιείτε την συσκευή. Το φωτάκι λειτουργίας θα πρέπει τώρα να είναι αναμμένο.
- ✚ Απαιτούνται περίπου 20 λεπτά για να φουσκώσει πλήρως το στρώμα.
- ✚ Σκεπάστε το στρώμα με ένα σεντόνι και εφαρμόστε χαλαρά.
- ✚ Ρυθμίστε τον έλεγχο πίεσης για να προσφέρετε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή πάντα με τις οδηγίες του ειδικού ιατρού.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- ✚ Το στρώμα μπορεί να καθαριστεί με απολυμαντικό διάλυμα
- ✚ Μην βυθίζετε την αντλία σε νερό
- ✚ Αποφεύγετε γενικά τις υψηλές θερμοκρασίες (πχ κλιβάνους )
- ✚ Μετά τον καθαρισμό το στρώμα και το κάλυμμα να αεριστούν μέχρι να στεγνώσουν πλήρως

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση : 220V/50Hz
- Παροχή αέρα: 5 liter/min.
- Όρια Πίεσης: 40 mmHg – 100 mmHg
- Χρόνος Κύκλου: 10 min.
- Βάρος: 1,4 kg
- Διαστάσεις Αντλίας: 26cm(M) x 12cm(Π) x 11.5cm(Y)
- Διαστάσεις Στρώματος : 200cm(M) x 90cm(Π) x 6.5cm(Y)
- Υλικό κατασκευής Στρώματος : PVC – EN71

ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 έτη